

# KIT CHIRURGICO PREMIUM SHELTA



# Il kit unico e completo per i sistemi Premium e Shelta

Il kit chirurgico combinato Premium Shelta contiene la strumentazione per la fase chirurgica e la fase protesica delle fixture di entrambe le sistematiche implantari.

La cassetta porta strumenti, in Radel autoclavabile, offre semplicità di utilizzo e immediatezza nella successione della sequenza degli strumenti, con l'ausilio di un sistema di codici colore che tracciano le procedure chirurgiche più idonee per i vari diametri implantari. Le descrizioni di questi strumenti sono indicate sul tray e consentono all'utilizzatore una più facile identificazione di ciascuno strumento e il successivo riposizionamento dopo la fase di detersione e pulizia.


Unitariamente al kit chirurgico vengono forniti i lucidi radiografici degli impianti Premium e Shelta per consentire tramite analisi radiografica o tomografica la scelta degli impianti nei diametri, lunghezze e morfologie più appropriati.



Tutte le frese dispongono di pratici stop di profondità che possono essere inseriti con grande semplicità e rimossi dalle frese in direzione punta > gambo.

Sono inclusi gli avvitatori per le viti chirurgiche di chiusura. Inoltre sono presenti gli avvitatori protesici, anche in versione con raccordo per cricchetto, per il serraggio delle viti protesiche.

È contenuto anche un pratico cricchetto che svolge sia la funzione di chiave fissa durante l'inserimento degli impianti che di chiave dinamometrica per il controllo del torque di chiusura delle viti protesiche.

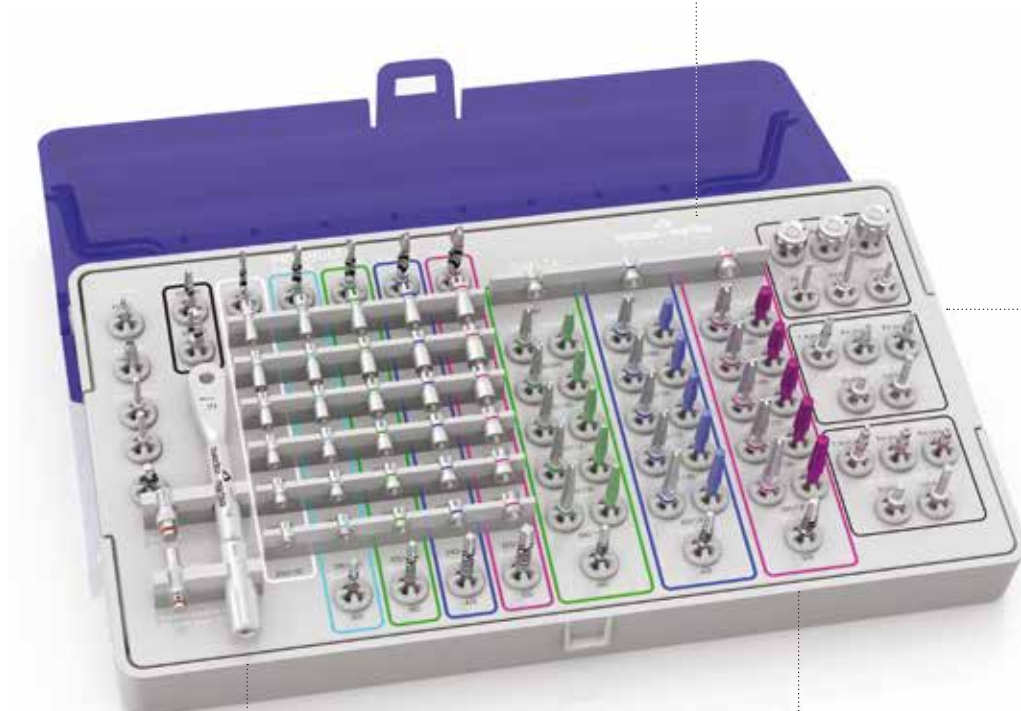Sono incluse le repliche Reply, per il controllo della preparazione del sito e del parallelismo tra gli impianti relative, alla sistematica Shelta.







Descrizione	Codice
<p>Kit chirurgico contenente gli strumenti necessari per gli impianti Premium e Shelta</p>	<p><b>ZPRESH*</b></p>  <p>The image shows a blue carrying case for the ZPRESH surgical kit, which is open to reveal a white tray containing a variety of surgical instruments, including forceps, probes, and other specialized tools, organized in rows.</p>
<p>Cassetta portastrumenti in Radel per gli strumenti per Premium Shelta</p>	<p><b>PRESH-TRAY*</b></p>  <p>The image shows a blue carrying case for the PRESH-TRAY instrument tray, which is open to reveal a white tray containing a variety of surgical instruments, including forceps, probes, and other specialized tools, organized in rows.</p>

\*Le sigle ZPRESH e PRESH-TRAY sono seguite da una lettera e un numero che indicano la revisione del kit. Il contenuto del kit potrà essere aggiornato e variato nel caso Sweden & Martina ravveda l'opportunità di sviluppo e miglioramento.

**Avvertenza importante**

Le informazioni complete ed esaustive relative alla preparazione implantare, la descrizione dettagliata degli strumenti e le sequenze chirurgiche, devono essere consultate nel manuale chirurgico dei sistemi implantologici Premium e/o Shelta.

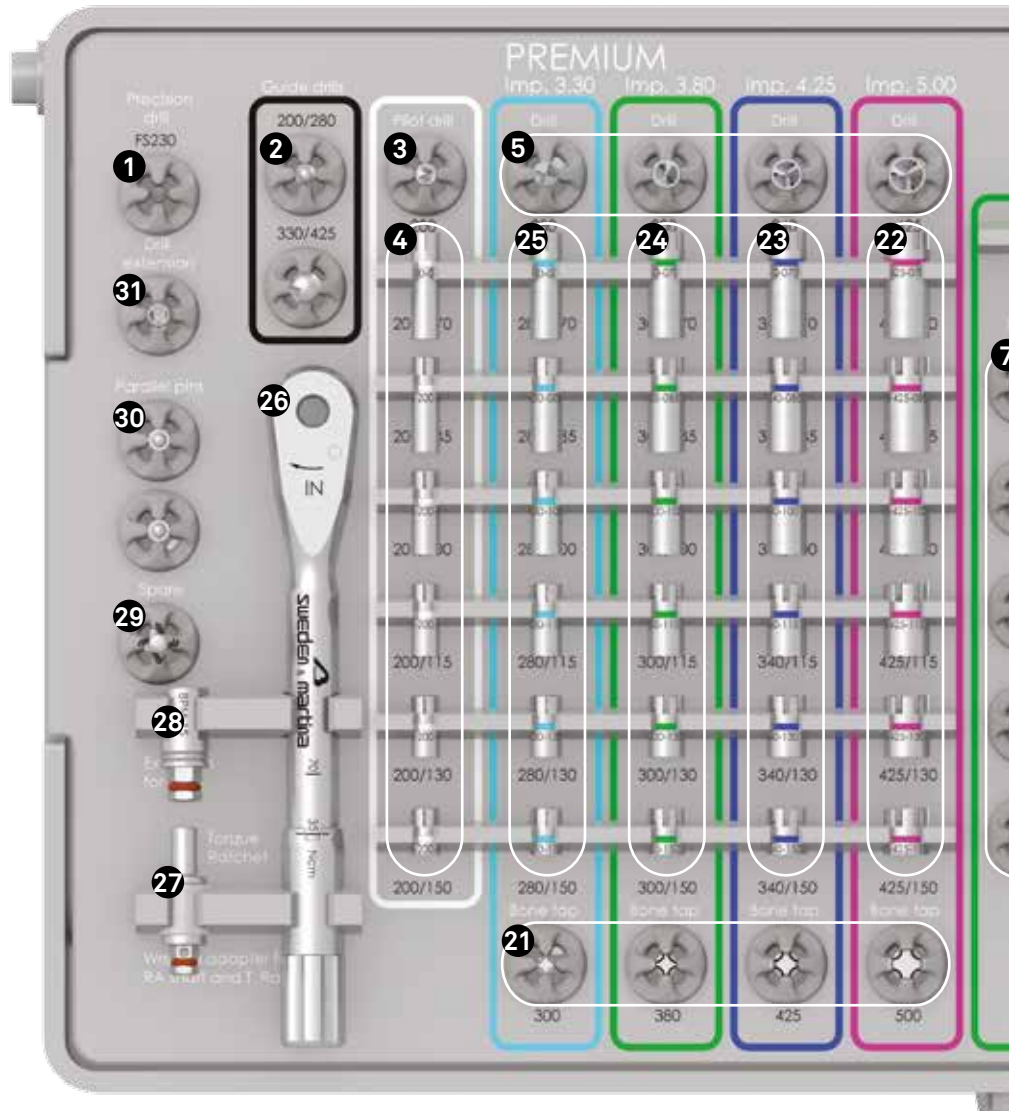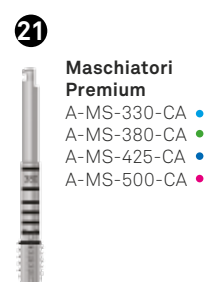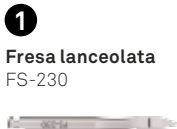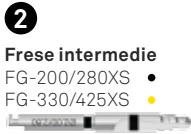



**8****Repliche**

- SH-380-085-RP ●
- SH-380-100-RP ●
- SH-380-115-RP ●
- SH-380-130-RP ●
- SH-380-150-RP ●

**9****Frese coniche**

- SH-FK425-085 ●
- SH-FK425-100 ●
- SH-FK425-115 ●
- SH-FK425-130 ●
- SH-FK425-150 ●

**10****Repliche**


- SH-425-085-RP ●
- SH-425-100-RP ●
- SH-425-115-RP ●
- SH-425-130-RP ●
- SH-425-150-RP ●

**11****Frese coniche**

- SH-FK500-085 ●
- SH-FK500-100 ●
- SH-FK500-115 ●
- SH-FK500-130 ●
- SH-FK500-150 ●

**12****Repliche**

- SH-425-085-RP ●
- SH-425-100-RP ●
- SH-425-115-RP ●
- SH-425-130-RP ●
- SH-425-150-RP ●

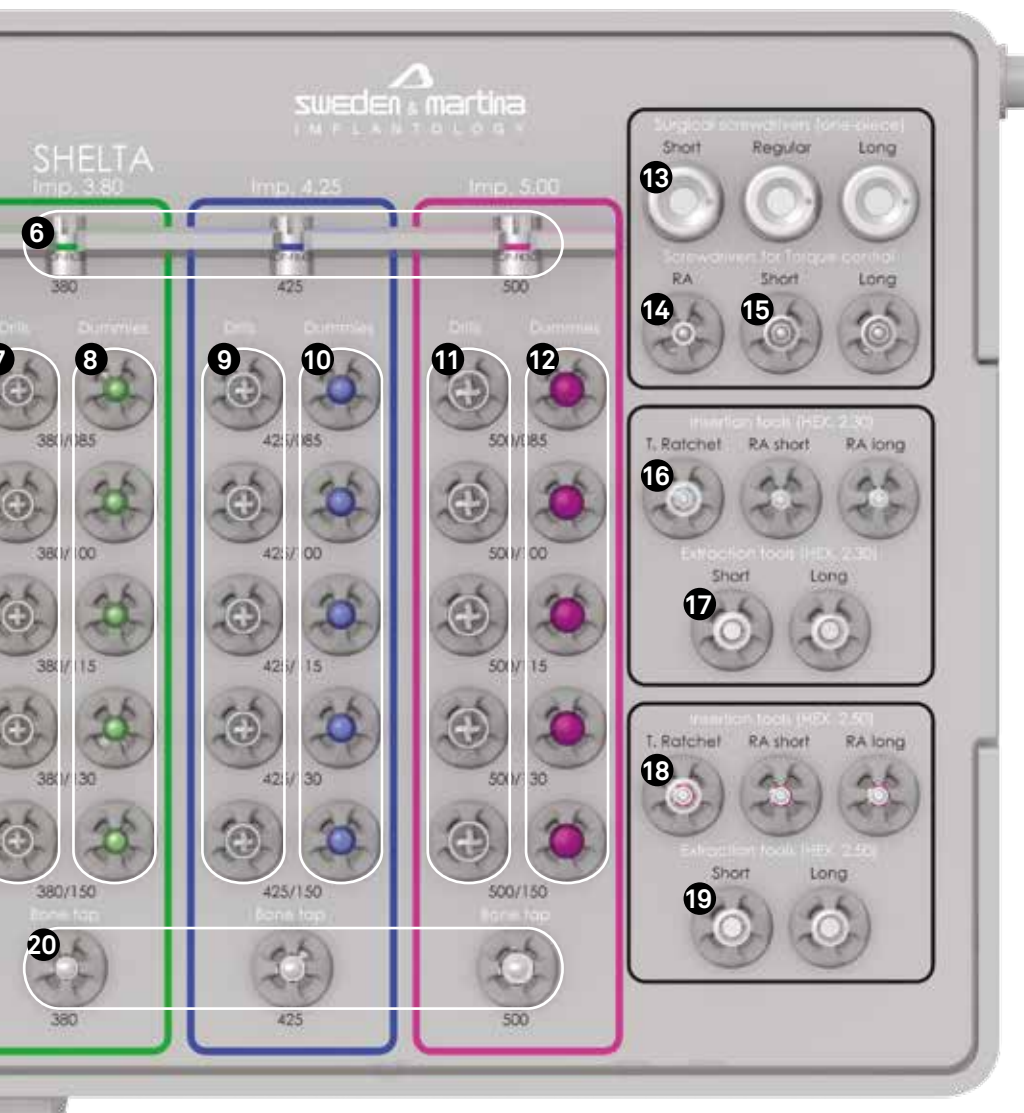**13****Avvitatori chirurgici digitali**

HSMXS-20-DG



HSM-20-DG



HSM-L-20-DG

**14****Avvitatori per contrangolo**

HSM-20-CA

**15****Avvitatori protesici**

HSM-20-EX



HSM-L-20-EX

**20****Maschiatori Shelta**

- SH-MS-380-CA ●
- SH-MS-425-CA ●
- SH-MS-500-CA ●

**19****Brugole Hex. 2.50 mm**

BC-EX250



BL-EX250

**18****Easy Insert Hex. 2.50 mm**

EASYC4-EX250-CA



EASYL4-EX250-CA



EASY4-EX250-EX

**17****Brugole Hex. 2.30 mm**

BC-EX230



BL-EX230

**16****Easy Insert Hex. 2.30 mm**

EASYC4-EX230-CA



EASYL4-EX230-CA



EASY4-EX230-EX



### Fresa lanceolata, fresa pilota e fresa intermedia

- Fresa lanceolata di precisione per incidere la corticale, pertanto molto appuntita e tagliente.
- Fresa pilota dotata di tacche al laser per indicare la profondità di lavoro, è fornita con i relativi stop di profondità.
- Frese intermedie, portano progressivamente il diametro del sito da 2.00 mm a 2.80 mm e da 3.30 mm a 4.25 mm.



### Frese finali Premium e relativi stop di profondità

- Frese finali con un numero di taglienti proporzionato al diametro del foro, consentendo preparazioni implantari molto precise.
- Gli stop di profondità garantiscono una preparazione in tutta sicurezza.



### Frese finali Shelta e relativi stop di profondità

- La geometria di queste frese coniche consente di raccogliere i frustoli d'osso rimosso durante la preparazione del sito.
- Gli stop di profondità in dotazione consentono un maggior controllo nella preparazione del sito implantare.



### Repliche REPLY

- Realizzate in titanio Gr. 5, **replicano la morfologia delle frese finali** dei relativi impianti Shelta.
- Utili per **verificare la congruità e la profondità della preparazione** fatta con le frese finali coniche, nonché per **verificare l'altezza transmucosa** grazie alle pratiche tacche millimetriche presenti alla base di ogni replica.
- Possono fungere da perno di parallelismo per **verificare l'asse della preparazione** fatta con la fresa.



### Driver Easy Insert

- **La procedura chirurgica di inserimento è mountless: gli impianti vengono ingaggiati direttamente all'interno della connessione da pratici driver Easy Insert**, studiati in modo particolare per garantire una presa sicura nella connessione dell'impianto.
- Il peculiare disegno brevettato dei driver Easy Insert fa sì che siano le facce dello strumento (e non gli spigoli) ad andare in battuta nelle facce del pozzetto implantare, **prevenendo deformazioni della connessione implantare**.
- Gli Easy Insert possono essere rimossi con facilità dai pozzetti implantari.



### Cricchetto dinamometrico

- Cricchetto, che svolge **sia funzione dinamometrica che di chiave fissa**.
- **Possibilità di regolazione del torque** da 10 a 70 Ncm, garantendo quindi un'assoluta precisione dalla fase di preparazione del sito implantare alla fase di avvitamento delle componenti protesiche.





rev.05-16  
v. 01



**Sweden & Martina S.p.A.**

Via Veneto, 10  
35020 Due Carrare (PD), Italy  
Tel. +39.049.9124300  
Fax +39.049.9124290  
info@sweden-martina.com  
[www.sweden-martina.com](http://www.sweden-martina.com)

**Sweden & Martina Mediterranea S.L.**

Sorolla Center, Oficina 801  
Avda Cortes Valencianas 58, 8pl  
46015-Valencia, Spain  
Tel. +34.96.3525895  
Tel. 900993963  
info.es@sweden-martina.com

**Sweden & Martina Ltd**

Unit 45  
Basepoint Business Centre  
Metcalf Way, Crawley,  
West Sussex, RH11 7XX, UK  
Toll free 0800 1123575  
info.uk@sweden-martina.com

**Sweden & Martina Inc.**

c/o DCI Management  
301 Pleasant St.  
Abbottstown, 17301 PA, US  
Toll free 844-8MARTINA  
844-862-7846  
info.us@sweden-martina.com

Gli impianti e gli strumenti chirurgici presenti nel presente dépliant sono Dispositivi Medici e sono fabbricati da Sweden & Martina S.p.A. Gli articoli presenti sono conformi alle norme ISO 9001 e ISO 13485 e sono registrati con marchio CE (Classe I) e CE0476 (Classe IIa) in accordo con la Direttiva Europea sui Dispositivi Medici n.93/42 e con la Direttiva Europea n. 2007/47/CE. Sono conformi al QSR 21 CFR part 820 e approvate FDA.

Lo stabilimento Sweden & Martina produce Dispositivi Medici in accordo alle cGMP vigenti in USA e in altri paesi del mondo.



Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.

Tutti i marchi presenti nel dépliant sono proprietà di Sweden & Martina.

Questi prodotti sono destinati agli studi medici e ai laboratori, la loro vendita non è rivolta al paziente.

È vietato rivendere, duplicare o divulgare i prodotti contenuti nel presente dépliant senza il consenso scritto di Sweden & Martina S.p.A.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, incluse indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali effetti collaterali, si faccia riferimento al sito web di Sweden & Martina S.p.A.

I contenuti del presente dépliant sono quelli aggiornati al momento della pubblicazione. Contattare l'azienda Sweden & Martina per gli aggiornamenti successivi.