

tisztítószerek használata ajánlott. Az oldat koncentrációjának és a mosás időtartamának meg kell felelnie a gyártó által előírtaknak. Használjon desztillált vizet a foltok és elszíneződések kialakulásának megakadályozására. Kiemeléskor ellenőrizze az eszközök bemélyedéseit, a furatokat stb., ellenőrizve a maradványok teljes eltávolítását. Ha szükséges, ismételje meg a ciklust vagy kézzel tisztítsa meg.

Kézi tisztítás esetén: használjon megfelelő semleges tisztítószert, tartsa be a gyártó utasításait. A termékeket puha sörtéjű kefével bőséges folyó víz alatt tisztítsa meg. A keféket használva, alkalmazzon a tisztító oldatot minden felületen. Desztillált vízzel öblítse le legalább 4 percig. Győződjön meg arról, hogy a folyóvíz bőségesen átfolyik az esetleges furatokon.

Amennyiben belső öblítéses fűrékről van szó, a kapott tú segítséggel a foglalatoknál győződjön meg, hogy az öblítő furatok teljesen tiszták és nincsenek bennük csontdarabok vagy biológiai szövetdarabok. Az öblítés után, teljesen szárítsa meg az eszközöket és megfelelő steril tasakokban helyezze el.

Amennyiben szárítási ciklust végezne egy mosó és fertőtlenítő berendezés ciklusának részeként, ne lépje túl a 120 °C-ot.

b. Sterilizálás:

Vákuum autoklávban történjen, és a következő módon végezze a sterilizálást:

- Hőmérséklet= 121 + 124 °C, autokláv ciklus minimum 20 perc és 15 perc szárítási ciklus.

c. Tárolás:

Sterilizálás után a terméknek a sterilizáláshoz használt tasakokban kell maradnia. A tasakokat csak közvetlenül az újból használat előtt lehet felbontani. A sterilizálásra szánt tasakok zárt állapotban általában képesek megőrizni a steril állapotot, kivéve a csomagolás sérülése esetén. Ezért fordítson különös figyelmet arra, hogy ne használja a komponenseket, ha a tasakok megsérültek, és újraterminálásuk előtt ismét sterilizálja azokat. A sterilizált termékek tárolási ideje a tasakokban nem haladhatja meg a tasakok gyártója által ajánlott időtartamot. A terméket hűvös és száraz helyen, közvetlen napfénytől, víztől és hőforrásoktól távol kell tárolni.

10. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

A sebészeti eszközök tervezése és gyártása a felhasznált anyagok, a gyártási folyamatok, a sterilizálás, a megadott információk és a csomagolás tekintetében a legújabb harmonizált irányelveknek és szabványoknak megfelelően történik.

11. ÁRTALMATLANÍTÁSI ELJÁRÁSOK

A sebészeti eszközöket, használatukat követően a hatályos helyi előírásoknak megfelelően biológiai hulladékként kell ártalmatlanítani.

12. HIBÁS TERMÉKKEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG ÉS GARANCIAFELTÉTELEK

A páciens optimális gyógyítása és igényeinek figyelembevételére elengedhetetlen feltétele az implantátum sikerének, ezért gondosan kell kiválasztani a páciens, tájékoztatni kell a kezeléssel járó kockázatokról és kezeléshez kötődő feladatokról, és ösztönözni kell a sikeres eredmény elérése érdekében a fogorvossal való együttműködésre.







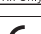
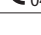
Ehhez a betegnek meg kell őriznie a megfelelő higiéniai feltételeket, amelyet a vizsgálatok és ellenőrzések során megerősítenek; meg kell győződni és dokumentálni kell, hogy az orvos utasításait és előírásait betartotta-e a páciens. Az Sweden & Martina S.p.A. által adott utasítások a kezelés idején rendelkezésre állnak, és a fogorvosi gyakorlat elfogadta azokat; ezeket be kell tartani és alkalmazni kell a kezelés minden szakaszában: a páciens anamnéziséstől kezdve a műtét utáni ellenőrzésig.

A garancia csak az ellenőrzött gyártási hibákra terjed ki, a cikkszámmal és tételszámmal azonosított darab előzetes megküldésével, a garancia érvényességi idején belül. A garancia záradékok megtalálhatók a www.sweden-martina.com oldalon.

13. A HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK DÁTUMA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

Az alábbi használati utasítások 2019. június hónaptól hatályosak és érvényesek.

Használt szimbólumok jelmagyarázata

	Figyelem, lásd használati utasítást
	Tételszám
	Kód
	Gyártó
	Nem steril termék
	Olvassa el a használati utasítást https://www.sweden-martina.com/en_gb/ifu/
	Az amerikai szövetségi törvény korlátozza a fogorvos által történő vagy annak megrendelése alapján történő értékesítést
	CE megfelelési jelölés