

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA		
	Vigyázat! Lásd használati utasítást	✓
	Adagszám	✓
	Kód	✓
	Gyártó	✓
	Gyártás országa	✓
	UDI (Egyedi eszközazonosító) kód	✓
	Orvostechnikai eszköz	✓
	Tanulmányozza a használati utasítást: www.sweden-martina.com	✓
	CE megjelölés Adott esetben: Ezt a szimbólumot kövesse a Bejelentett szervezet azonosítója.	✓
	Az amerikai szövetségi törvény alapján az eszköz csak orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető	✓
	Ne használja, ha a csomagolás sérült	✓
	Nem steril termék	✓

01. Táblázat

Eszköz	Besorolás	Besorolás szabály	Kockázati osztály
Üres, rozsdamentes acél tálcá	Nem-invazív orvostechnikai eszköz	1	I
Teljes sebészeti készlet	Újra felhasználható sebészeti műszerek	6	Ila
Gyémánt fúrók	Újra felhasználható invazív sebészeti műszerek ideiglenes használatra (kevesebb, mint 60 percig)	6	Ila
Wolfrám-karbid fúrók	Újra felhasználható invazív sebészeti műszerek ideiglenes használatra (kevesebb, mint 60 percig)	6	Ila
Szuperfinom szemcseméretű gyémánt korong	Újra felhasználható invazív sebészeti műszerek ideiglenes használatra (kevesebb, mint 60 percig)	6	Ila
Puha vaddisznóbőr sörtéjű kefe	Újra felhasználható invazív sebészeti műszerek ideiglenes használatra (kevesebb, mint 60 percig)	6	Ila
Acél tágitók	Újra felhasználható invazív sebészeti műszerek ideiglenes használatra (kevesebb, mint 60 percig)	6	Ila
Eldobható Moore-korongok	Újra felhasználható invazív sebészeti műszerek ideiglenes használatra (kevesebb, mint 60 percig)	6	Ila
Polírozó gumi	Újra felhasználható invazív sebészeti műszerek ideiglenes használatra (kevesebb, mint 60 percig)	6	Ila

01. ábra
Előkészítő fúró készlet



02. ábra
Előkészítő és befejező fúrók ideiglenes hidakhoz

