



mantenga una buona igiene, confermata durante i check-up ed appuntamenti di controllo; essa deve sempre essere assicurata e documentata come, peraltro, vanno osservate e documentate le indicazioni e le prescrizioni pre e post- operatorie. Le istruzioni fornite da Sweden & Martina sono disponibili al momento del trattamento ed accettate dalla pratica odontoiatrica; occorre osservarle ed applicarle in tutte le fasi di cura: dall'anamnesi del paziente ai check-up post-operatori. La garanzia copre unicamente i difetti accertati di produzione, previo invio del pezzo identificato da codice articolo e lotto, entro il periodo di validità della garanzia. Le clausole di garanzia sono disponibili sul sito [www.sweden-martina.com](http://www.sweden-martina.com)

**16. DATA E VALIDITÀ DELLE PRESENTI ISTRUZIONI D'USO**  
Le presenti istruzioni d'uso hanno validità e decorrenza dal mese di Gennaio 2015.

Tabella 01

Dispositivo	Confezione	Definizione ai sensi della Direttiva 93/42	Regola	Classe di rischio
Mini viti per uso ortodontico FIRMA, FIRMA PLUS	Confezione monouso e sterile.	Dispositivi impiantabili destinati ad uso a lungo termine (superiore ai 30 giorni)	8	Iib

Fig. 01 e 02

Confezione con blister all'interno



Blister con fiala all'interno

Fig. 03

Fiala con mini vite ortodontica all'interno



Fig. 04

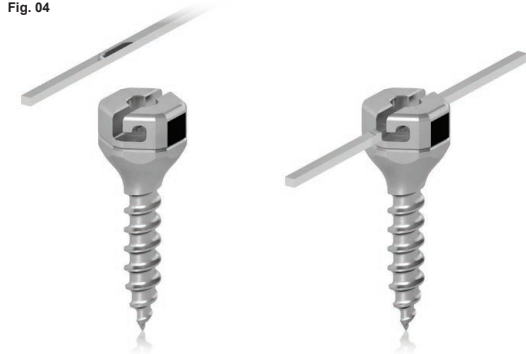


Fig. 05


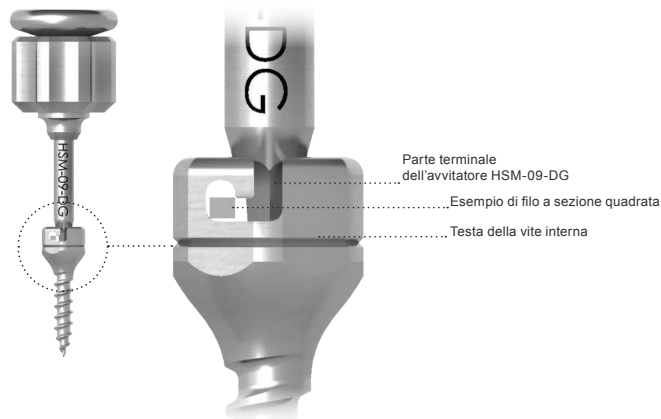


Fig. 06

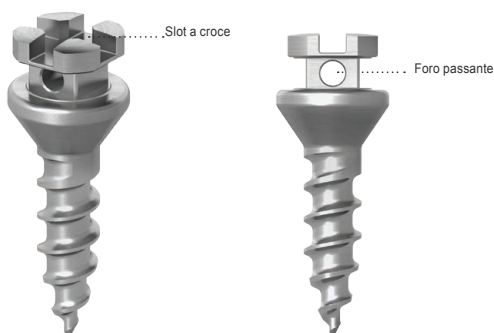

Legenda simboli

	Attenzione, vedere istruzioni per l'uso
	Numero di lotto
	Codice
	Sterilizzato con radiazioni ionizzanti
	Data di scadenza oltre la quale non utilizzare il prodotto
	Non riutilizzare, prodotto monouso
	Non risterilizzare
	Fabbricante
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata
	Marcatura di conformità CE
	La legge federale americana limita la vendita da parte o per l'ordine di un odontoiatra

**sweden & martina**

Sweden & Martina S.p.A.  
Via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (Padova) - Italia  
Tel. +39.049.9124300 - Fax + 39.049.9124290  
e-mail: [info@sweden-martina.com](mailto:info@sweden-martina.com)  
[www.sweden-martina.com](http://www.sweden-martina.com)