

OT EQUATOR® și tehnica Easy Fix



OT EQUATOR®

O conexiune pentru toate tipurile de proteze pe implanturi

OT EQUATOR® este un bont protetic din titan cu profil redus și diametru mic, disponibil pentru toate platformele implantare Sweden & Martina. Dimensiunile compacte ale sistemului permit utilizarea acestuia chiar și în spațiile protetice cele mai restrânse.

Versatilitatea sa permite, de asemenea, satisfacerea diferitelor cerințe de proiectare, oferind o gamă largă de la reabilitarea protetică cu overdenture până la proteza fixă fără șuruburi de fixare și găurile aferente.



Dimensiuni compacte

stabilitate maximă în spații minime

Diametru redus

ocupare minimă pe țesuturile moi

Gamă largă

soluții pentru toate platformele Sweden & Martina

Profil redus

ideal pentru înălțimi protetice reduse

Titan gr. 5 ELI

rezistență mecanică ridicată și biocompatibilitate

Versatilitate

compatibil pentru overdenture și proteză fixă

Soluții disponibile

Geometria bontului protetic OT EQUATOR®, în combinație cu recipientul pentru capacele din oțel tradițional, garantează o retenție ridicată și de durată. Sistemul permite, de asemenea, **compensarea disparelismelor implantare de până la 15°**, păstrând eficiența și funcționalitatea capacelor retentive. Pentru disparelisme implantare mai mari de 15° și până la 25°, sistemul **Smart Box** este soluția ideală, garantând o compensare eficientă a divergențelor fără a compromite funcționalitatea sistemului retentiv.

BONT PROTETIC SINGULAR



Bonturile protetice pot fi achiziționate individual cu codul respectiv.

SET STANDARD



Ideal pentru compensarea disparelismelor implantare de până la 15°, asigurând menținerea funcționalității capacelor retentive.

Codurile se referă la pachetul care conține 1 bont protetic OT EQUATOR®, 4 capace asortate, 1 recipient din oțel pentru capac și 1 disc protector.

SET CU SMART BOX



Soluția ideală pentru disparelisme implantare mai mari de 15° și până la 25°.

Codurile se referă la pachetul care conține 1 bont protetic OT EQUATOR®, 1 recipient din titan de capac Smart Box, 1 disc protector și 4 capace asortate

Conexiune Collex One ø 3.30

implant Prama, Premium Power

h mm		singular	set standard	set cu smart box
0.5		030PRP3305-SM	130PRP3305-SM	131PRP3305-SM
1.00		030PRP331-SM	130PRP331-SM	131PRP331-SM
2.00		030PRP332-SM	130PRP332-SM	131PRP332-SM
3.00		030PRP333-SM	130PRP333-SM	131PRP333-SM
4.00		030PRP334-SM	130PRP334-SM	131PRP334-SM
5.00		030PRP335-SM	130PRP335-SM	131PRP335-SM

Conexiune Collex One ø 3.80

implant Premium Shelta Power

h mm		singular	set standard	set cu smart box
1.00		030PRP381-SM	130PRP381-SM	131PRP381-SM
2.00		030PRP382-SM	130PRP382-SM	131PRP382-SM
3.00		030PRP383-SM	130PRP383-SM	131PRP383-SM
4.00		030PRP384-SM	130PRP384-SM	131PRP384-SM
5.00		030PRP385-SM	130PRP385-SM	131PRP385-SM

Conexiune Ext Hex 2.40 h 1 mm

implant Outlink²

h mm		singular	set standard	set cu smart box
2.00		030ONK332-SM	130ONK332-SM	131ONK332-SM
3.00		030ONK333-SM	130ONK333-SM	131ONK333-SM
4.00		030ONK334-SM	130ONK334-SM	131ONK334-SM
5.00		030ONK335-SM	130ONK335-SM	131ONK335-SM

Conexiune Ext Hex 2.70 h 0.7 mm

implant Outlink², Syra

h mm		singular	set standard	set cu smart box
2.00		030ONK412-SM	130ONK412-SM	131ONK412-SM
3.00		030ONK413-SM	130ONK413-SM	131ONK413-SM
4.00		030ONK414-SM	130ONK414-SM	131ONK414-SM
5.00		030ONK415-SM	130ONK415-SM	131ONK415-SM

Conexiune DAT

implant CSR

h mm		singular	set standard	set cu smart box
1.00		030CDT1-SM	130CDT1-SM	131CDT1-SM
2.00		030CDT2-SM	130CDT2-SM	131CDT2-SM
3.00		030CDT3-SM	130CDT3-SM	131CDT3-SM
4.00		030CDT4-SM	130CDT4-SM	131CDT4-SM
5.00		030CDT5-SM	130CDT5-SM	131CDT5-SM

Conexiune DAT-N

implant CSR

h mm		singular	set standard	set cu smart box
1.00		030CDTN1-SM	130CDTN1-SM	131CDTN1-SM
2.00		030CDTN2-SM	130CDTN2-SM	131CDTN2-SM
3.00		030CDTN3-SM	130CDTN3-SM	131CDTN3-SM
4.00		030CDTN4-SM	130CDTN4-SM	131CDTN4-SM
5.00		030CDTN5-SM	130CDTN5-SM	131CDTN5-SM

Youse I

h mm		singular	set standard	set cu smart box
1.00		030YI1	130YI1	131YI1
2.00		030YI2	130YI2	131YI2
3.00		030YI3	130YI3	131YI3
4.00		030YI4	130YI4	131YI4
5.00		030YI5	130YI5	131YI5
6.00		030YI6	130YI6	131YI6

Youse V narrow

h mm		singular	set standard	set cu smart box
1.00		030YVN1	130YVN1	131YVN1
2.00		030YVN2	130YVN2	131YVN2
3.00		030YVN3	130YVN3	131YVN3
4.00		030YVN4	130YVN4	131YVN4
5.00		030YVN5	130YVN5	131YVN5
6.00		030YVN6	130YVN6	131YVN6

Youse V regular

h mm		singular	set standard	set cu smart box
1.00		030YVR1	130YVR1	131YVR1
2.00		030YVR2	130YVR2	131YVR2
3.00		030YVR3	130YVR3	131YVR3
4.00		030YVR4	130YVR4	131YVR4
5.00		030YVR5	130YVR5	131YVR5
6.00		030YVR6	130YVR6	131YVR6

Accesorii OT EQUATOR®

	144AE	Analog de laborator
	044CAIN	Transfer de amprentă normo 2 buc.
	100PD	Discuri de protecție 10 buc.
	140CEG	Capace Equator galbene, 4 buc.
	140CEN	Capace Equator negre, 4 buc.
	140CER	Capace Equator roz, 4 buc.
	140CET	Capace Equator albe/transparente, 4 buc.
	140CEV	Capace Equator mov, 4 buc.
	141CAE	Containere inox pentru capace, 2 buc.
	330SBE	Recipient din titan Smart Box OT EQUATOR® cu capac negru
	192ECE	Capace Equator cu container • 1 recipient inox pentru capace • 1 capac negru de laborator • 4 capace retentive (1 galbenă extra-soft, 1 roz soft, 1 albă transparentă standard, 1 mov tare) • 1 disc de protecție
	485IC	Montor/extractor de capace
	774CQAET	Cheie pătrată

Accesorii pentru amprentarea dentară digitală

	145SAE	Scan abutment cu șurub
	144AVC4	Analog digital de laborator cu șurub


*Accesorii care pot fi utilizate atât pentru realizarea protezelor overdenture, cât și pentru tehnica EASY FIX.

Tehnica Easy Fix pentru proteză fixă pe abutment OT EQUATOR®

Easy Fix este soluția dezvoltată de Rhein 83 pentru realizarea reabilitărilor protetice Full arch fixe pe implanturi, fără găuri pentru șuruburi, prin utilizarea abutmenturilor OT EQUATOR®. **T-Base-ul** specific integrează un inel seeger inovator, proiectat pentru a compensa disparelisme implantare de până la 60°. Inelul garantează, de asemenea, retenția protezei. Este disponibil în trei variante diferite cu forțe retentive crescătoare, selectabile în funcție de numărul de implanturi utilizate.


Easy Fix reprezintă o soluție versatilă care combină **control, siguranță și libertate de proiectare**, permițând clinicianului să realizeze reabilitări fixe pe orice platformă implantară de la Sweden & Martina.

Utilizarea unui singur component pe parcursul tuturor fazelor chirurgicale și protetice simplifică fluxul de lucru, reducând gestionarea componentelor și accesoriilor, timpii operaționali și utilizarea materialelor și instrumentelor, cu avantaje concrete pentru clinică și laborator. Abutmentul **OT EQUATOR®** este, de asemenea, perfect integrabilă în fluxurile digitale moderne și este compatibilă cu principalele software-uri CAD-CAM.

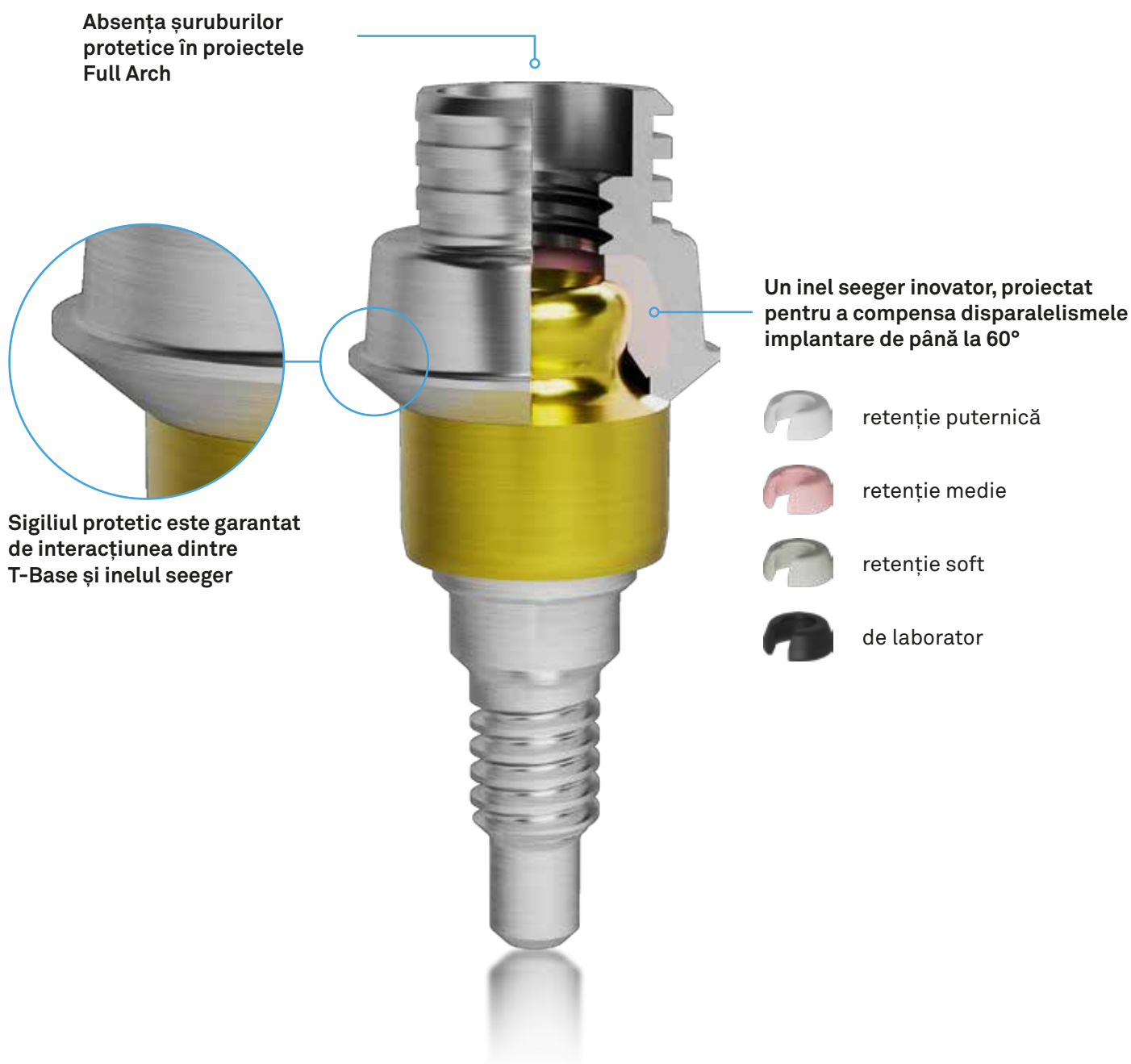

Îndepărtare simplă și atraumatică a protezei

Tehnica **Easy Fix** permite pregătirea unui **singur orificiu de deblocare**, prin care se introduce instrumentul special. Înșurubând instrumentul de deblocare în T-Base Easy Fix, proteza este ridicată progresiv, permițând îndepărtarea acesteia într-un mod **simplu, rapid și atraumatic**.

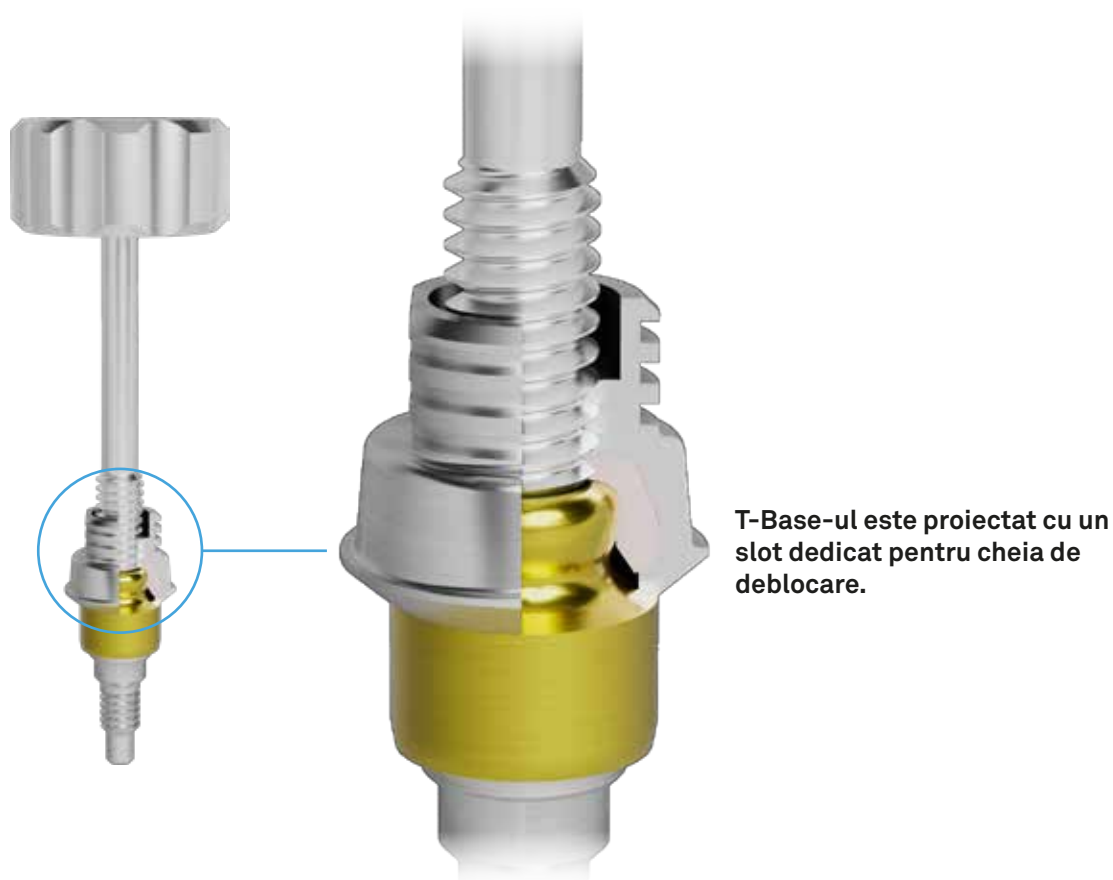

Orificiul de deblocare poate fi poziționat în punctul cel mai potrivit din punct de vedere estetic și funcțional, garantând **cea mai mare libertate de proiectare** în realizarea lucrării protetice.

Ușurința de îndepărtare a protezei simplifică, de asemenea, procedurile de igienă și controalele periodice, contribuind la sănătatea țesuturilor peri-implantare.



Componente pentru tehnica Easy Fix

Componentele necesare pentru realizarea tehnicii Easy Fix sunt disponibile în diferite configurații, pentru a răspunde diferitelor nevoi clinice și de laborator: **T-Base** vândute individual, **kit seeger** în diverse configurații și **kit Easy Fix cu T-Base** disponibile în două versiuni.

T-Base Easy Fix din titan			Kit seeger Easy Fix din PEEK		
h mm					
4.00		RMEF		KSEF	Kit care conține 4 seeger: negru, roz, ivoire, alb
6.00		RMAEF		KSL	Kit care conține 4 seeger negri
9.00		RMLEF		KSM	Kit care conține 4 seeger roz
				KSSO	Kit care conține 4 seeger ivoire
				KSST	Kit care conține 4 seeger albi

4 Easy Fix T-Base			
h mm			
4.00		KEF4MEF	Kit care conține: 4 T-Base ø 3,5 mm, 1 locking screw, 4 seeger albi strong, 4 seeger roz medium, 4 seeger ivoire soft, 4 seeger negri pentru laborator
6.00		KEF4MAEF	Kit care conține: 4 T-Base ø 3,5 mm, 1 locking screw, 4 seeger albi strong, 4 seeger roz medium, 4 seeger ivoire soft, 4 seeger negri pentru laborator
9.00		KEF4MLEF	Kit care conține: 4 T-Base ø 3,5 mm, 1 locking screw, 4 seeger albi strong, 4 seeger roz medium, 4 seeger ivoire soft, 4 seeger negri pentru laborator

Kit Easy Fix T-Base			
h mm			
4.00		KMSRF	Kit care conține: 1 T-Base ø 3,5 mm și 4 seeger peek: 1 alb strong, 1 roz medium, 1 ivoire soft, 1 negru pentru laborator
6.00		KMASRF	Kit care conține: 1 T-Base ø 3,5 mm și 4 seeger peek: 1 alb strong, 1 roz medium, 1 ivoire soft, 1 negru pentru laborator
9.00		KMLSRF	Kit care conține: 1 T-Base ø 3,5 mm și 4 seeger peek: 1 alb strong, 1 roz medium, 1 ivoire soft, 1 negru pentru laborator

Accesorii pentru tehnica Easy Fix



144TLE

Transfer lung cu șurub h 11,50 mm



149TEF

Șurub de închidere



149VEF

Locking screw



239VSEF

Șurub distanțier



240GCEF

Manșon calcinabil scurt h 4,00 mm



240GCAEF

Manșon calcinabil h 6,00 mm



240GCLEF

Manșon calcinabil lung h 9,00 mm



491EEF

Inserator-tester-extractor



491SEIM

Instrument de inserare T-Base



761EEF

Instrument de deblocare h 17,90 mm



761ELEF

Instrument de deblocare lung h 23,90 mm



rev. 09-26



Sweden & Martina S.p.A.

Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

Sweden Martina Romania srl

Strada Wilhelm Filderman nr. 18 Sector 3
030866 București - România
Sediu: 0040 0374 96 88 55
info.ro@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom

info.uk@sweden-martina.com

Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.

info.us@sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España

info.es@sweden-martina.com

Sweden & Martina Lda - Portugal

info.pt@sweden-martina.com

Sweden & Martina France Sarl - France

info.fr@sweden-martina.com

Articolele prezente în publicație sunt dispozitive medicale marcate CE 0425 fabricate de Rhein 83 S.r.l. Via E.Zago, 10/ABC, 40128 Bologna Italia



Unele produse ar putea să nu fie disponibile pe toate piețele.
Marca OT EQUATOR® este proprietatea Rhein 83 S.r.l.

Aceste produse sunt destinate cabinetelor medicale și laboratoarelor, vânzarea lor nu este destinată pacienților.
Este interzisă revânzarea, duplicarea sau divulgarea produselor conținute în această publicație fără acordul scris al Sweden & Martina S.p.A.
Pentru informații suplimentare despre produse, vă rugăm să consultați site-ul web al Sweden & Martina S.p.A.
Conținutul este actualizat la momentul publicării. Contactați compania Sweden & Martina pentru actualizări ulterioare.