

PRAMA **ALL**



PRAMA ALL

L'IMPLANT EN 1 TEMPS AVEC PILIER DROIT OU ANGULÉ INTÉGRÉ

Restaurations prothétiques transvissées immédiates, rapides et sans compromis.

Une solution conçue pour simplifier les procédures et élargir les possibilités de traitement, tout en maintenant la cohérence avec les principes de Prama : respect des tissus mous, gestion prothétique optimisée et résultats stables dans le temps.

Évolution « pour tous » les cas avec la simplicité d'un implant EN 1 TEMPS et l'innovation de la connexion angulée.

Les implants monoblocs représentent une solution efficace pour des cas cliniques sélectionnés, dans lesquels la simplicité chirurgicale et des temps de traitement réduits jouent un rôle fondamental.

Une approche rationnelle, conçue pour répondre à des besoins spécifiques, avec des protocoles simples et fiables.

Le pilier conique pour prothèse transvissée avec divergences angulaires est intégré à l'implant et il est idéal pour des réhabilitations à mise en charge immédiate.

OPTIMISATION DES TEMPS ET SIMPLIFICATION DU PROTOCOLE

Le design 1 temps monobloc unissant les parties endo-osseuse et transmucueuse, permet de raccourcir les étapes chirurgicales et prothétiques, facilitant l'adoption de protocoles à mise en charge immédiate.



**Le choix parfait pour
des réhabilitations
multiples et d'arcades
complètes, en présence
de divergences entre
les implants.**

Plateforme PRAMA ALL

PLATEFORME À CONNEXION UNIQUE

Commune à tous les diamètres d'implants pour une approche prothétique simplifiée

STABILITÉ MÉCANIQUE ET GESTION DES TISSUS


La connexion unique et précise évite les micromouvements et garantit une plus grande stabilité primaire, essentielle dans les traitements à mise en charge immédiate. Cette solution optimise la gestion des tissus mous dès les premières phases de l'intervention.

COL UTM

La surface conçue pour la zone d'interface entre tissus mous et tissus durs



Là où c'est nécessaire, la convergence laisse plus d'espace aux tissus mous

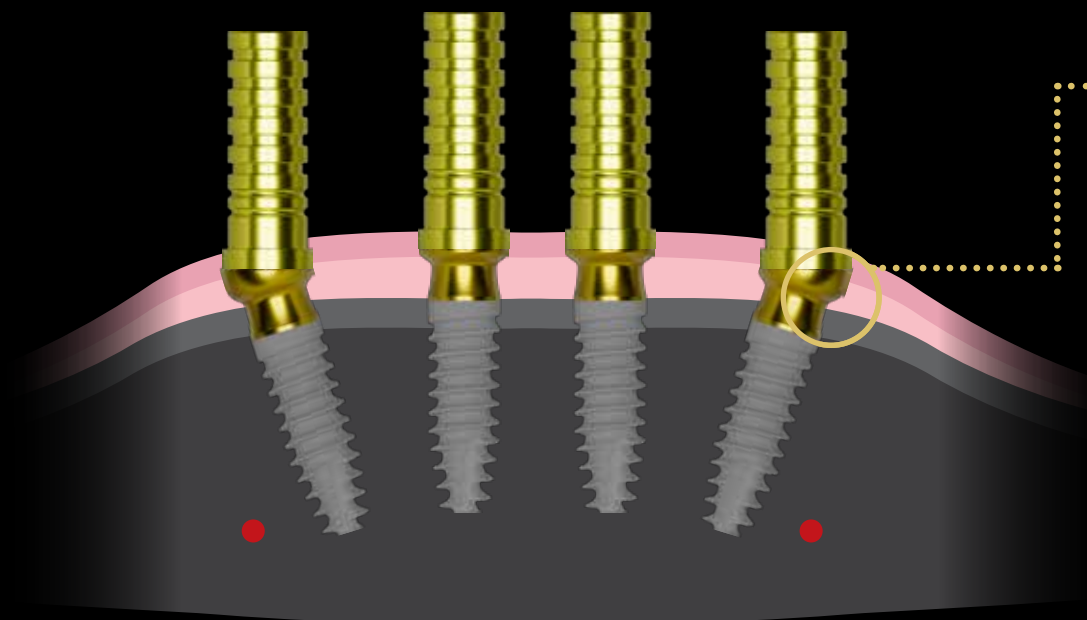

PRAMA ALL

Morphologie Power : qualité éprouvée




PARTIE APICALE AUTOFORANTE

Conçue pour faciliter
l'insertion et
la décompression
du caillot



APEX


Conique, avec une spire
plus profonde sur toute
la longueur, il assure la
stabilité surtout dans les
cas post-extractionnels

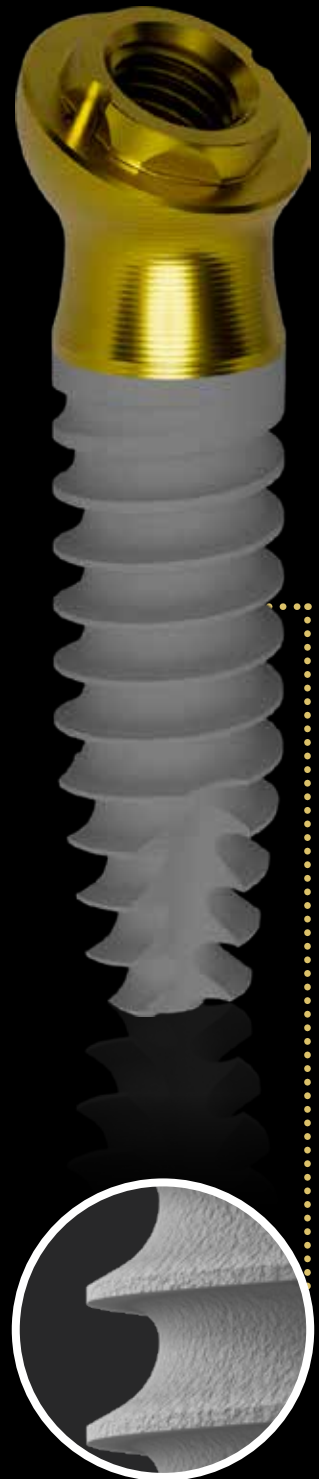


SPIRES EN CONTREFORT INVERSÉ


Tranchantes et
pénétrantes même dans
l'os dur, optimisent la
distribution des charges

Prama All, droit

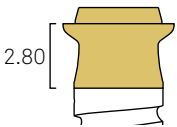

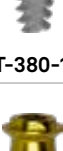
PRAMA ALL		
longueur d'implant	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●
8.50 mm	 LA-ZT-380-085-D	 LA-ZT-425-085-D
10.00 mm	 LA-ZT-380-100-D	 LA-ZT-425-100-D
11.50 mm	 LA-ZT-380-115-D	 LA-ZT-425-115-D
13.00 mm	 LA-ZT-380-130-D	 LA-ZT-425-130-D
15.00 mm	 LA-ZT-380-150-D	 LA-ZT-425-150-D
18.00 mm	 LA-ZT-380-180-D	 LA-ZT-425-180-D

Prama All, angulation 17°

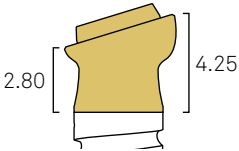

PRAMA ALL		
longueur d'implant	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●
8.50 mm	 LA-ZT-380-085-A17	 LA-ZT-425-085-A17
10.00 mm	 LA-ZT-380-100-A17	 LA-ZT-425-100-A17
11.50 mm	 LA-ZT-380-115-A17	 LA-ZT-425-115-A17
13.00 mm	 LA-ZT-380-130-A17	 LA-ZT-425-130-A17
15.00 mm	 LA-ZT-380-150-A17	 LA-ZT-425-150-A17
18.00 mm	 LA-ZT-380-180-A17	 LA-ZT-425-180-A17

Prama All, angulation 30°

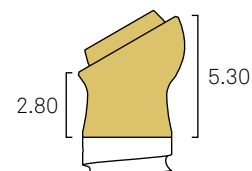

PRAMA ALL		
longueur d'implant	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●
8.50 mm	 LA-ZT-380-085-A30	 LA-ZT-425-085-A30
10.00 mm	 LA-ZT-380-100-A30	 LA-ZT-425-100-A30
11.50 mm	 LA-ZT-380-115-A30	 LA-ZT-425-115-A30
13.00 mm	 LA-ZT-380-130-A30	 LA-ZT-425-130-A30
15.00 mm	 LA-ZT-380-150-A30	 LA-ZT-425-150-A30
18.00 mm	 LA-ZT-380-180-A30	 LA-ZT-425-180-A30

PRAMA ALL

ET LA CHIRURGIE GUIDÉE



L'utilisation du logiciel **Archiplan** permet une planification précise du cas clinique, géré au moyen de guides chirurgicaux démontables, composés d'une structure imprimée et d'une barre usinée déjà équipée de cylindres de guidage.



La chirurgie guidée est particulièrement simple grâce à la disponibilité d'une instrumentation dédiée spécifique : des kits chirurgicaux complets comprenant des forets, des emporte-pièces gingivaux, des profileurs d'os, des connecteurs de pose d'implants, des tournevis et tout le nécessaire pour réaliser une chirurgie guidée.

L'implant **Prama All** peut être utilisé aussi bien en chirurgie guidée qu'en technique traditionnelle. Son orientation angulaire est facilement identifiable grâce au porte-implant préassemblé fourni.



Droit



Angulé à 17°




Angulé à 30°

PRAMA ALL ET DIGITAL ATELIER

Votre interlocuteur unique pour la gestion complète des flux numériques réalisés sur prescription.
Une équipe spécialisée vous accompagne à chaque étape grâce à des services intégrés de :

- Conception de prothèses sur mesure et planification chirurgicale personnalisée, pour des solutions adaptées aux besoins cliniques spécifiques ;
- Fabrication de prothèses sur mesure, réalisées à l'aide de technologies avancées et de matériaux sélectionnés afin de garantir précision et fiabilité ;
- Réalisation de guides chirurgicaux personnalisés, pour soutenir les interventions guidées et mini-invasives ;
- Assistance technique dédiée, pour vous accompagner dans la gestion des cas et l'utilisation des solutions Digital Atelier.

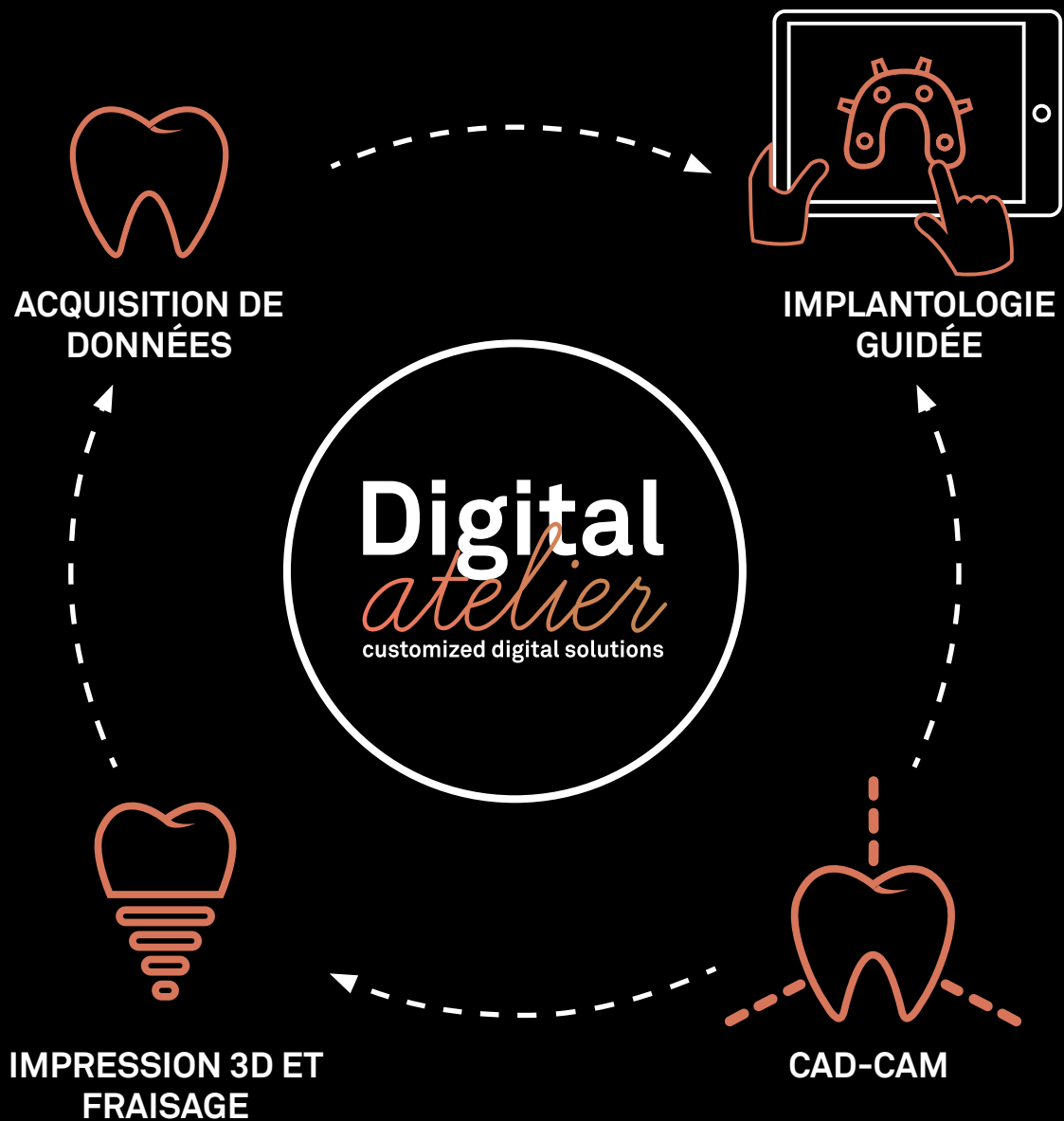


Kit Prama Power

Kit chirurgical complet avec les instruments nécessaires à la pose des implants Prama Power (cod. ZPRAMA-INT).

Tous les instruments peuvent être achetés individuellement comme pièces de rechange.

- 1** Foret pointeur
FS-230
- 2** Jauges de parallélisme
PPTL-2-28
- 3** Foret intermédiaire
• FGS-340/425
- 4** Foret pilote $\varnothing$ 2,00 mm*
• FPT3-200-LXS
- 5** Butées pour foret pointeur
• STOP4-200-085
• STOP4-200-100
• STOP4-200-115
• STOP4-200-130
• STOP4-200-150
- 6** Foret cylindrique intermédiaire $\varnothing$ 2,50 mm*
• FFT3-250-LXS
- 7** Butées pour foret cylindrique intermédiaire $\varnothing$ 2,50 mm
• STOP4-250-085
• STOP4-250-100
• STOP4-250-115
• STOP4-250-130
• STOP4-250-150
- 8** Foret conique intermédiaire $\varnothing$ 2,50 mm
• SE-FK250
- 9** Butées pour foret conique intermédiaire
CSR-STOP-2028-085
CSR-STOP-2028-100
CSR-STOP-2028-115
CSR-STOP-2028-130
CSR-STOP-2028-150
- 10** Forets cylindriques terminaux*
• FFT3-280-LXS pour implants $\varnothing$ 3,30 mm
• FFT3-300-LXS pour implants $\varnothing$ 3,80 mm
• FFT3-340-LXS pour implants $\varnothing$ 4,25 mm
• FFT3-425-LXS pour implants $\varnothing$ 5,00 mm
- 11** Butées pour foret cylindrique $\varnothing$ 2,80 mm
FFT3-280-LXS
• STOP4-280-085
• STOP4-280-100
• STOP4-280-115
• STOP4-280-130
• STOP4-280-150
- 12** Butées pour foret cylindrique $\varnothing$ 3,00 mm
FFT3-300-LXS
• STOP4-300-085
• STOP4-300-100
• STOP4-300-115
• STOP4-300-130
• STOP4-300-150
- 13** Butées pour foret cylindrique $\varnothing$ 3,40 mm
FFT3-340-LXS
• STOP4-340-085
• STOP4-340-100
• STOP4-340-115
• STOP4-340-130
• STOP4-340-150
- 14** Butées pour foret cylindrique $\varnothing$ 4,25 mm
FFT3-425-LXS
• STOP4-425-085
• STOP4-425-100
• STOP4-425-115
• STOP4-425-130
• STOP4-425-150
- 15** Forets coniques $\varnothing$ 3,80 mm
• SH-FK380-085
• SH-FK380-100
• SH-FK380-115
• SH-FK380-130
• SH-FK380-150
- 16** Jauges de profondeur et de direction $\varnothing$ 3,80 mm
• SH-380-085-RP
• SH-380-100-RP
• SH-380-115-RP
• SH-380-130-RP
• SH-380-150-RP
- 17** Forets coniques $\varnothing$ 4,25 mm
• SH-FK425-085
• SH-FK425-100
• SH-FK425-115
• SH-FK425-130
• SH-FK425-150
- 18** Jauges de profondeur et de direction $\varnothing$ 4,25 mm
• SH-425-085-RP
• SH-425-100-RP
• SH-425-115-RP
• SH-425-130-RP
• SH-425-150-RP
- 19** Forets coniques $\varnothing$ 5,00 mm
• SH-FK500-085
• SH-FK500-100
• SH-FK500-115
• SH-FK500-130
• SH-FK500-150
- 20** Jauges de profondeur et de direction $\varnothing$ 5,00 mm
• SH-500-085-RP
• SH-500-100-RP
• SH-500-115-RP
• SH-500-130-RP
• SH-500-150-RP

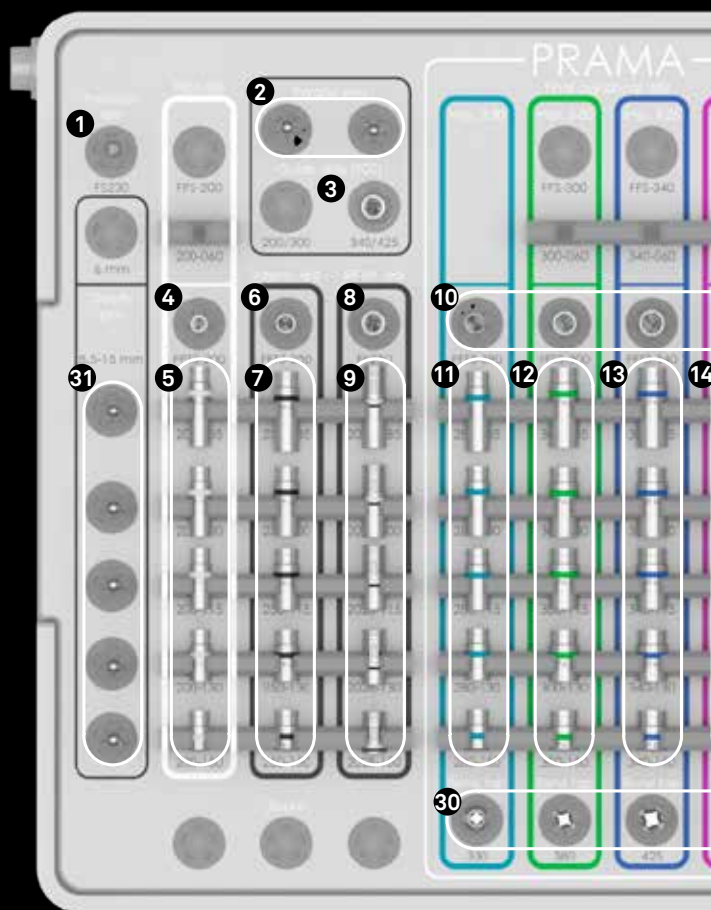

L-TRAYL-INT cassette porte-instruments en Radel.

Pour les instruments optionnels, veuillez vous référer au catalogue Prama Power.

- 21** Butée pour fraises coniques
- SH-STOP4-FK380
 - SH-STOP4-FK425
 - SH-STOP4-FK500

- 22** Forets countersinks
- A-FCC-380
 - A-FCC-425
 - A-FCC-500

- 23** Connecteurs de pose d'implants Easy Insert
- EASYC4-EX230-CA

EASYL4-EX230-CA

EASY4-EX230-EX

- 24** Tournevis manuels hexagonaux (1,25 mm)
- HSMXS-20-DG HSM-20-DG HSML-20-DG

- Mandrins hexagonaux (1,25 mm)**
- HSM-20-CA HSM-20-EX HSML-20-EX

- 25** Clé à cliquet dynamométrique
- CRI5-KIT



- 26** Prolongateurs et adaptateur
- PROF-CAL3
- Prolongateur pour forets



- BPM-15**
- Prolongateur pour clé à cliquet pour instruments avec connexion hexagonale




- B-AVV-CA3**
- Prolongateur pour contre-angle ISO pour instruments avec raccord hexagonal



- 27** Adaptateur manuel pour instruments à connexion hexagonale
- AVV3-MAN-DG

- 28** Prolongateur pour clé à cliquet pour instruments avec connexion ISO
- AVV-CA-DG-EX

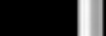

- 29** Tarauds coniques
- SH-MS-380-CA
 - SH-MS-425-CA
 - SH-MS-500-CA

- 30** Tarauds cylindriques
- SM-MS-330
 - A-MS-380
 - A-MS-425
 - A-MS-500

- 31** Jauges pour le positionnement du col
- L-PP-085
 - L-PP-100
 - L-PP-115
 - L-PP-130
 - L-PP-150






Films radiographiques inclus dans le kit, pouvant être commandés séparément avec les codes L-L100 (tailles réelles), L-L120 (tailles augmentées de 20 %), L-L130 (tailles augmentées de 30 %).

Kit chirurgical pour la chirurgie guidée

Le plateau contient certains logements pour instruments relatifs à différentes lignes d'implants. Ces instruments ne sont donc pas inclus dans l'équipement standard du kit.



Forets optionnels pour la préparation de sites implantaire L. 18 mm.

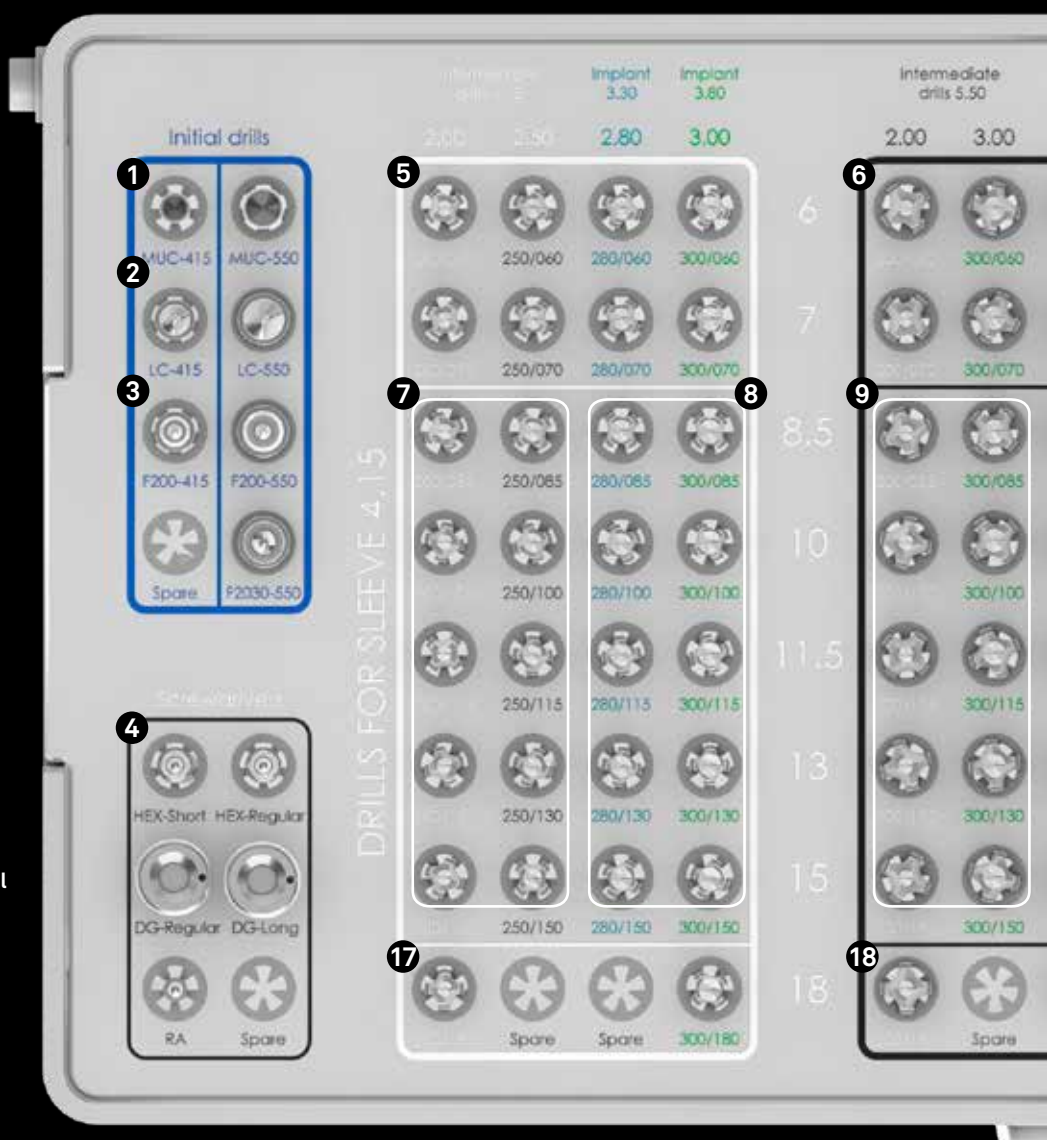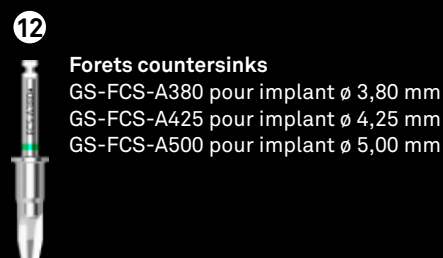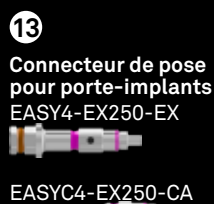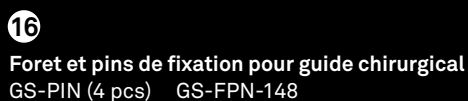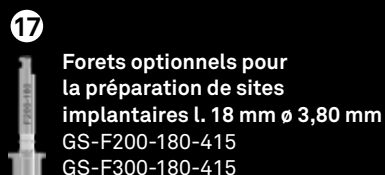

GSPROA-TRAY-INT cassette porte-instruments en Radel pour la chirurgie guidée. Pour les instruments optionnels, veuillez vous référer au catalogue Prama Power.

Les forets optionnels pour la préparation de sites implantaires de longueur 6,00 mm peuvent également être commandés ensemble comme set complémentaire avec le code GS-PROA-INTEGRA-060.

5



forets optionnels pour la
préparation de sites implantaires
l. 6,00 mm ϕ 3,80 mm
GS-F200-060-415
GS-F250-060-415
GS-F280-060-415
GS-F300-060-415

6



forets optionnels pour la préparation
de sites implantaires l. 6,00 mm
 ϕ 4,25 et 5,00 mm
GS-F200-060-550
GS-F300-060-550
GS-F340-060-550
GS-F425-060-550

7



Forets intermédiaires
pour douille ϕ 4,15 mm
GS-F200-085-415
GS-F200-100-415
GS-F200-115-415
GS-F200-130-415
GS-F200-150-415

GS-F250-085-415
GS-F250-100-415
GS-F250-115-415
GS-F250-130-415
GS-F250-150-415

8



Forets terminaux pour
douille ϕ 4,15 mm
GS-F280-085-415
GS-F280-100-415
GS-F280-115-415
GS-F280-130-415
GS-F280-150-415


GS-F300-085-415
GS-F300-100-415
GS-F300-115-415
GS-F300-130-415
GS-F300-150-415

9



Forets intermédiaires
pour douille ϕ 5,50 mm
GS-F200-085-550
GS-F200-100-550
GS-F200-115-550
GS-F200-130-550
GS-F200-150-550

GS-F300-085-550
GS-F300-100-550
GS-F300-115-550
GS-F300-130-550
GS-F300-150-550

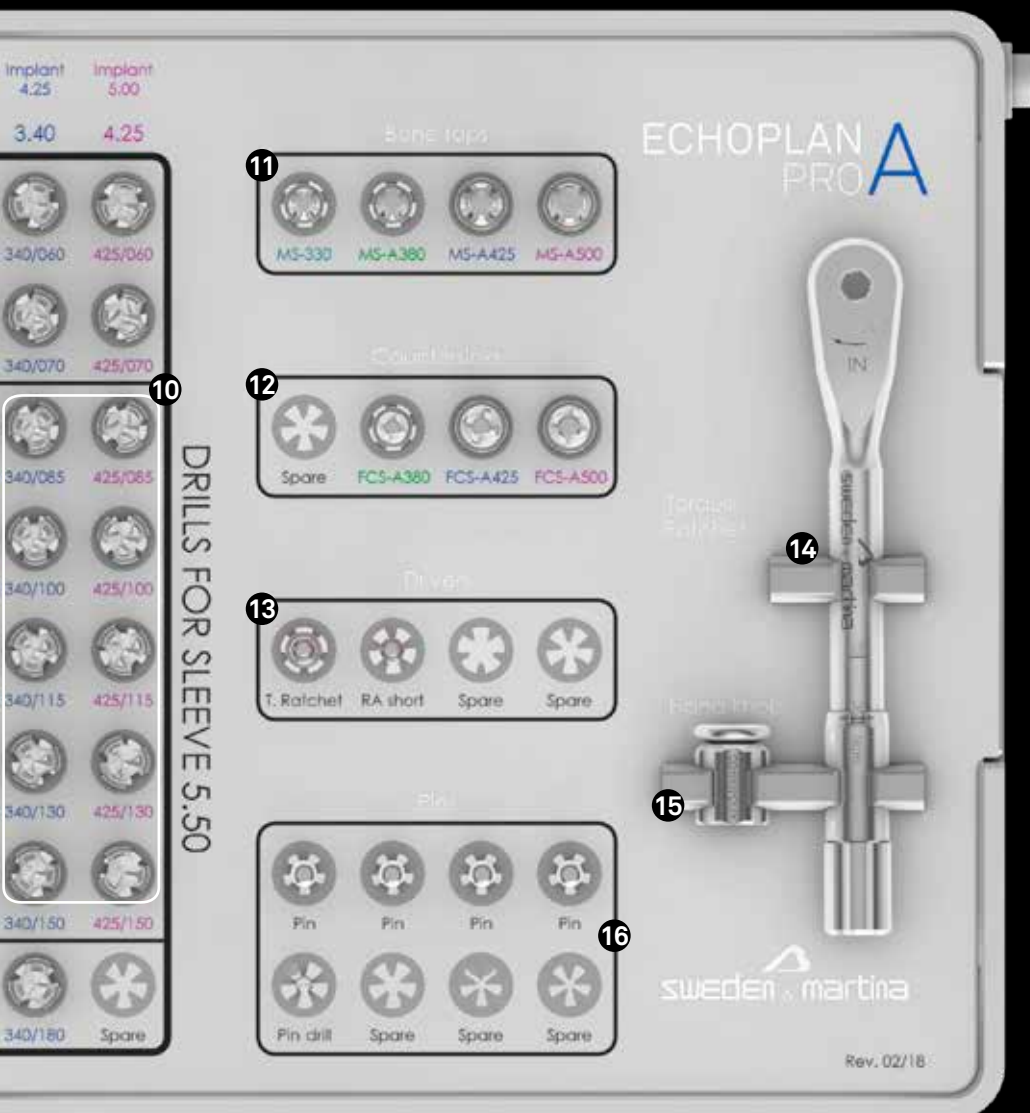

11



Tarauts
GS-SM-MS-330 pour implant ϕ 3,30 mm
GS-MS-A380 pour implant ϕ 3,80 mm
GS-MS-A425 pour implant ϕ 4,25 mm
GS-MS-A500 pour implant ϕ 5,00 mm

10



Forets terminaux pour implants
 ϕ 4,25 mm avec douille ϕ 5,50 mm
GS-F340-085-550
GS-F340-100-550
GS-F340-115-550
GS-F340-130-550
GS-F340-150-550


Forets terminaux pour implants
 ϕ 5,00 mm avec douille ϕ 5,50 mm
GS-F425-085-550
GS-F425-100-550
GS-F425-115-550
GS-F425-130-550
GS-F425-150-550

PRAMA ALL

Pour restaurations directes sur implant La solution fiable avec un encombrement minimal

Avec la **vis prothétique de 2,5 mm**, Prama All garantit une solidité mécanique supérieure, conçue pour affronter sans compromis même les charges les plus intenses, avec une plus grande liberté prothétique grâce à la hauteur verticale réduite.

Mais ce n'est pas seulement la robustesse : c'est la commodité d'un implant qui ne nécessite pas de composants additionnels et qui simplifie chaque étape du traitement. La géométrie convergente du col de Prama guide les tissus mous et facilite une restauration prothétique précise et stable, transformant ainsi la solidité à long terme.

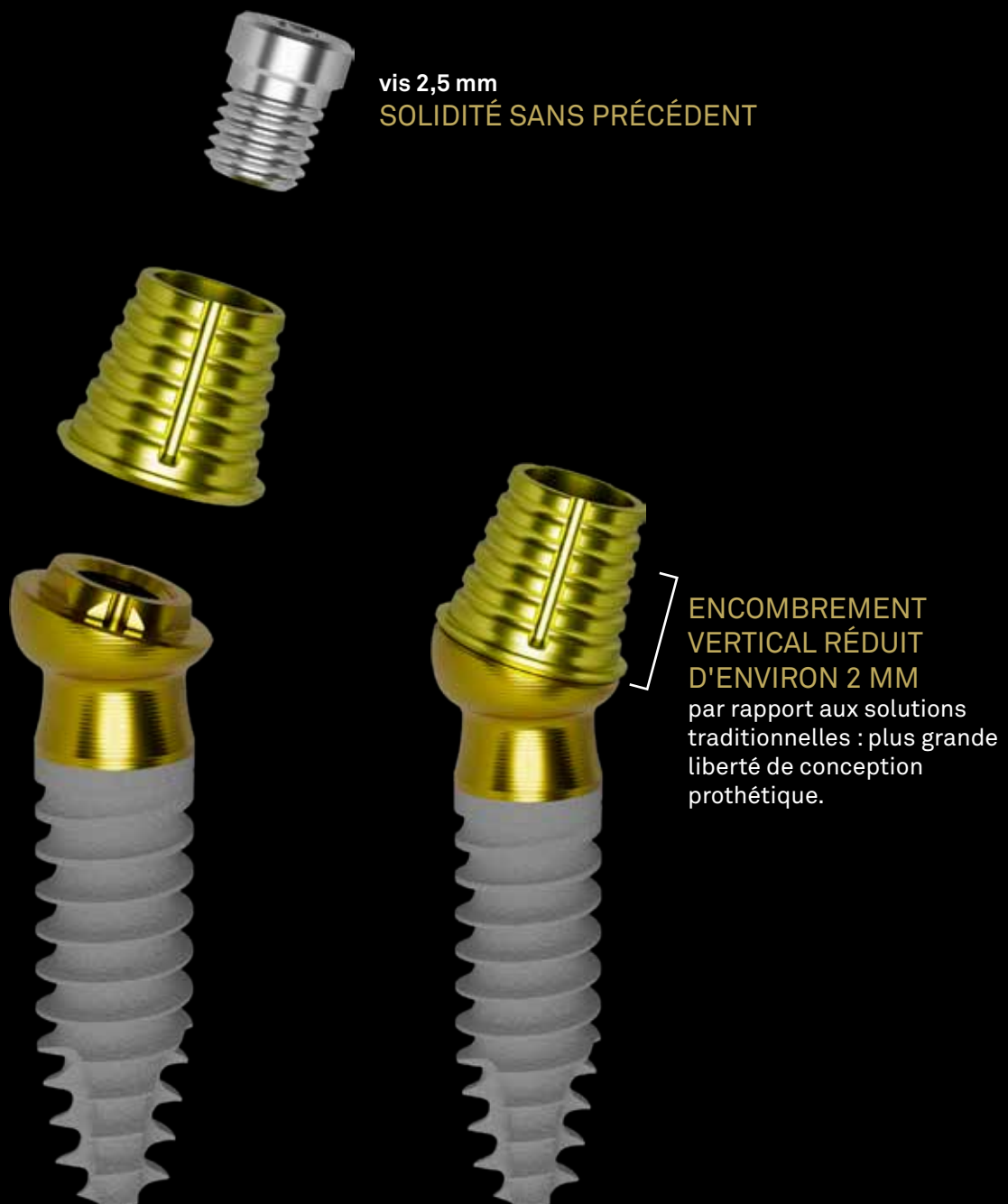


L'implant conserve son intégrité même si la vis se casse : il suffit de remplacer le convertisseur.

Il est recommandé de serrer le convertisseur avec un couple de 30–35 Ncm, en utilisant le tournevis approprié disponible comme accessoire séparé.

Gamme prothétique Prama All

Transfert Pick-up (ciel ouvert)

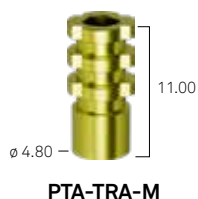

PTA-TRA-M

Vis PTA-VTRAL-250 incluse.

Coiffes de cicatrisation

en titane



PTA-CG



PTA-CGT

Vis PTA-VPA-250 incluse.


Composants Prama All pour rebasage et technique de collage

cylindre en titane,
rotationnel



PTA-CT-M

cylindre en PEEK,
rotationnel

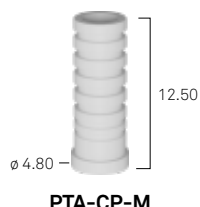

PTA-CP-M

cylindre en PMMA,
rotationnel



PTA-CC-M

Vis PTA-VPA-250 incluse.

Composants Prama All pour prothèse numérique

pilier de scannage
(scanbody) intra-oral



PTA-INT-CAMTRA-L

analogue de
numérisation



PTA-ANA-DIG

T-Connect pour prothèse
plurale



PTA-TC-M-C4

gaine calcinable
rotationnelle pour PTA-
TC-M-C4



PTA-CCTC-M-C4

Pilier de scannage (scanbody) : vis PTA-VPA-250-L incluse.

Analogue de numérisation : vis VADIG-180 incluse.

T-Connect (Tibase-Connect) pour prothèse plurale : vis PTA-VPA-250 incluse. Pour l'utilisation de la vis pour puit de vis à accès déporté, contactez directement le centre de services Digital Atelier.

Base métallique avec gaine calcinable

base CrCo avec gaine
calcinable



PTA-UCRCO


Vis PTA-VPA-250 incluse.

PRAMA ALL avec Converter

La solution qui convertit la plateforme au standard

Quand il faut de la flexibilité, Prama All s'adapte : grâce au **Converter Prama All**, il est possible d'utiliser des superstructures standard pour piliers coniques droits et angulés pour prothèse transvissée avec divergences angulaires.

Avec la **vis de 1,4 mm**, cette solution offre au clinicien la liberté d'utiliser une plateforme standard. Une transformation rapide, sans renoncer à la sécurité.

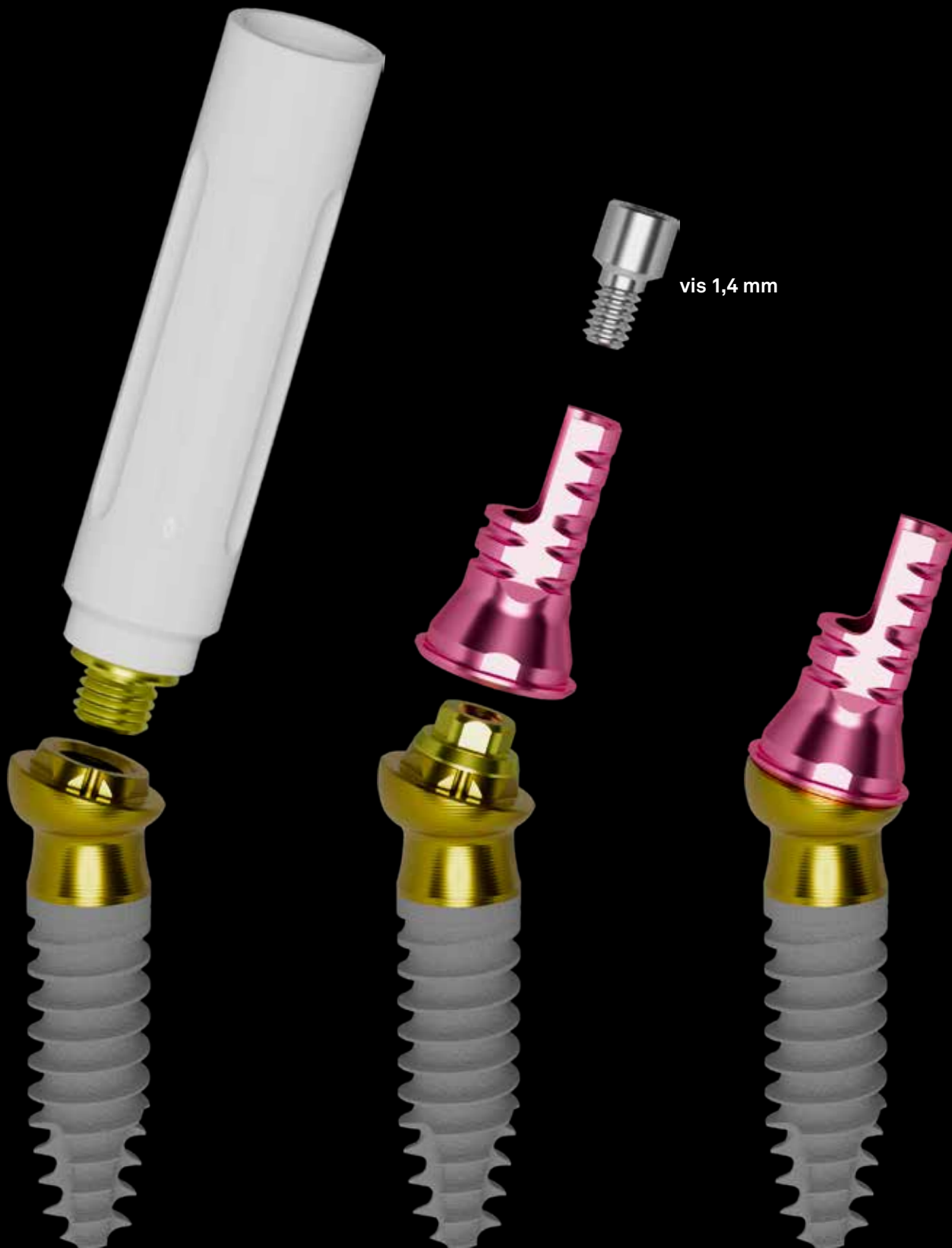

Converter Prama All

PTA-CONV-PADR.....



Convertisseur



convertisseur **PTA-CONV-PADR***

paquet de 10
unités **PTA-CONV-PADR-10**

**Emballé avec un porte-objet dédié.
Couple recommandé pour le serrage du convertisseur 25-30 Ncm.*

Mandrin pour convertisseur



PTA-CONV-AVV**

***vendu assemblé avec vis de sécurité pour tournevis PTA-CONV-V-AVV.*

Vis de sûreté pour mandrin



vis

PTA-CONV-V-AVV

Composants pour superstructures utilisables avec le Converter

Coiffes de cicatrisation

coiffe de cicatrisation en titane



PADR-CG

coiffe de cicatrisation en PEEK




PADR-CGP

PADR-CG : vis PAD-VP-140 incluse. | PADR-CGP : vis PAD-VCGP-140 incluse.

Prise d'empreinte

transfert d'empreinte snap-on
(ciel fermé) rotationnel

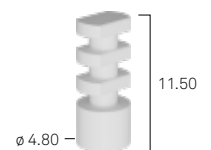

PADR-CAP-EX

transfert d'empreinte pick-up
(ciel ouvert) rotationnel



PADR-TRA

analogue de pilier conique




PADR-ANA

Transfert Pick up : vis PAD-VTRAL-140 incluse.

Composants pour rebasage et technique de collage

cylindre en PEEK, rotationnel

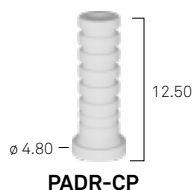

PADR-CP

cylindre en titane, rotationnel



PADR-CT

gaine calcinable en PMMA
rotationnelle
(vis non incluse)



PADR-CEM

cylindre calcinable en PMMA,
rotationnel



PADR-CC

cylindre en titane rotationnel sans
épaulement, pour reconstructions
esthétiques



PADR-BAS

Vis PAD-VP-140 incluse.

Base métallique avec gaine calcinable

base CrCO rotationnelle avec gaine
calcinable en PMMA



PADR-UCRCO

Vis PAD-VP-140 incluse.

Composants pour prothèse numérique

pilier de scannage (scanbody)
intra-oral pour vissage direct sur
plateforme implantaire*



Y-AVV-SB-DIG-NX

pilier de scannage (scanbody) intra-
oral pour vissage sur convertisseur*



Y-AVV-SBL-DIG-NX

analogue de numérisation



PADR-ANA-DIG

Tibase rotationnelle pour collage
avec cône h. 4



PADR-TC-M-4

Tibase rotationnelle pour collage avec
cône h 8 avec encoches de réduction



PADR-TC-M-8

Tibase rotationnelle pour collage pour
puit de vis à accès décentré



PADR-TCA-M**

gaine calcinable rotationnelle pour
PADR-TC-M-4 et PADR-TC-M-8



PADR-TC-CC-M-8

gaine calcinable anti-rotationnelle
pour
PADR-TCA-M



PADR-TC-CC-S-8

Piliers de scannage (Scanbody) et Tibases pour collage : vis PAD-VP-140 incluse.

Analogue de numérisation : vis VADIG-180 incluse.

*Utiliser le tournevis approprié YV-CV-MAN-M.

**Tibase rotationnelle pour collage pour puit de vis à accès décentré : vis PAD-VPA-140 non incluse, doit être commandée séparément.

Instruments chirurgicaux optionnels

Pins indicateurs de direction

	P-IND-A17	pour vérification de la préparation et l'angulation sélectionnée à 17°
	P-IND-A30	pour vérification de la préparation et l'angulation sélectionnée à 30°
	P-IND-DIR	pour vérification du positionnement de la plateforme prothétique pour connecteur angulé

Vis prothétiques

Vis pour Prama All

	PTA-VTRA-250	vis standard pour transfert pick-up (ciel ouvert) PTA-TRA-M
	PTA-VTRAL-250	vis longue pour transfert pick-up (ciel ouvert) PTA-TRA-M
	PTA-VTRAL-250-MAN	vis pour vissage manuel pour transfert pick-up (ciel ouvert) PTA-TRA-M
	PTA-VPA-250	vis M 2,5 mm pour vissage des composants prothétiques directement sur implants Prama All
	PTA-VPA-250-10	vis M 2,5 mm pour vissage des composants prothétiques directement sur implants Prama All, paquet de 10 unités

Vis de fixation sur convertisseur

	PAD-VTRAL-140	vis longue pour transfert pick-up (ciel ouvert) sur convertisseur
	PAD-VTRA-140	vis standard pour transfert pick-up (ciel ouvert) sur convertisseur
	PAD-VTRAL-140-MAN	vis pour vissage manuel pour transfert pick-up (ciel ouvert) PTA-TRA-M sur convertisseur
	PAD-VP-140	vis M 1,4 mm pour vissage des composants prothétiques sur convertisseur
	PAD-VP-140-10	vis M 1,4 mm pour vissage des composants prothétiques sur convertisseur, paquet de 10 unités
	PAD-VPA-140	vis M 1,4 mm pour vissage des Tibases PADR-TCA-M à puits de vis à accès déporté ; à utiliser avec les tournevis dédiés DSPDCLH-24 et DSPDCLH-32

Vis de serrage pour prothèses CAD-CAM

	PTA-VCAM-250	Vis M 2,5 mm pour serrage des superstructures en Zircône directes sur Prama All
	PTA-CAMPRON-10	anneaux d'étanchéité de rechange pour la tête de vis pour serrage direct sur Prama All
	PAD-VCAM140	vis M 1,4 mm pour serrage des superstructures en Zircône sur convertisseur
	CAMPRON205-10	anneaux d'étanchéité pour la tête de vis pour serrage sur piliers PADe
	VADIG-180	vis de blocage des analogues de numérisation
	PIN-ANA-DIG	clavette pour analogue numérique
	INS-ANA-180	porte-analogue pour l'insertion d'un analogue de numérisation M 1.8

Couples recommandés pour le serrage des composants prothétiques

8-10 Ncm	vis de couverture, de cicatrisation et de transferts
15-20 Ncm	toutes les vis prothétiques M 1,4 mm
20-25 Ncm	toutes les vis prothétiques M 2,5 mm
25-30 Ncm	tous les composants vissés directement sur la plateforme de l'implant Prama All (ex. convertisseur)

Avertissement important

Les vis de serrage sont toujours incluses dans les emballages de chaque composant prothétique, sauf indication contraire. Il est recommandé d'utiliser des vis d'essai pour les phases de laboratoire et de conserver la nouvelle vis fournie pour la fixation définitive en bouche.



rev. 06-26



Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com
www.prama.sweden-martina.com

Sweden Martina France Sarl - France
info.fr@sweden-martina.com
Sweden & Martina Ltd - United Kingdom
info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España
info.es@sweden-martina.com
Sweden & Martina Lda - Portugal
info.pt@sweden-martina.com
Sweden Martina România srl - România
info.ro@sweden-martina.com

Les implants, les composants prothétiques et les instruments chirurgicaux faisant l'objet du présent publication sont des Dispositifs Médicaux produits par Sweden & Martina S.p.A., Ces produits sont conformes aux normes ISO 9001 et ISO 13485 et sont enregistrés avec marquage CE conformément à la directive 93/42/CE et au Règlement (UE) n° 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

L'établissement de production de Sweden & Martina fabrique des dispositifs médicaux conformément aux cGMP en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays du monde.



Certains produits pourraient ne pas être disponibles sur tous les marchés.

Toutes les marques présentes dans le catalogue sont la propriété de Sweden & Martina, exception faite pour les produits portant une indication contraire.

Ces produits sont destinés aux cabinets médicaux et aux laboratoires, leur vente ne s'adresse pas au patient.

Il est interdit de revendre, dupliquer ou divulguer les produits contenus dans le présent catalogue sans le consentement écrit de Sweden & Martina S.p.A.

Pour toutes informations supplémentaires sur les produits, y compris les indications, contre-indications, avertissements, précautions et effets collatéraux potentiels, se référer au site web de Sweden & Martina S.p.A.

Les contenus de ce catalogue correspondent à la documentation mise à jour au moment de la publication. Contacter la société Sweden & Martina pour les mises à jour successives.