

5.0 GS

Guided Surgery 5.0 Kit

Kit GS 5.0, realmente único.

El nuevo kit de cirugía guiada para implantes Prama, Premium y Shelta Power.

Más ágil, más intuitivo, más completo.

Una sola solución, pensada para simplificar cada fase de la intervención guiada.

El kit GS 5.0 integra lógicas quirúrgicas en un instrumental esencial, compacto y altamente funcional.

Un solo kit para todos los implantes cónicos y cilíndricos, con fresas diseñadas para adaptarse a ambas morfologías

Cada componente está diseñado para reducir los pasos, optimizar los tiempos y ampliar las posibilidades operativas, para todo tipo de casos. Con el kit GS 5.0, la cirugía guiada se vuelve más fluida, precisa y accesible.




Permite la realización de preparaciones para implantes de 6 a 22 mm de longitud, por lo que también es apto para implantes nasales y pterigoideos.

Fresas finales con diámetros optimizados: menos instrumentos, gama más amplia.


Secuencia simplificada:

Las **fresas PREP**, usadas en sucesión, preparan el lecho para insertar los implantes a lo largo de toda la altura de la parte tratada (ZirTi). Los diámetros de las fresas están correlacionados con la medida del “core” de los implantes. En caso de implantes RF cónicos, las fresas deben usarse a altura progresiva.

Las **Cortical drills** preparan la parte más coronal de los implantes. Representan **el último paso de la preparación** en hueso compacto.

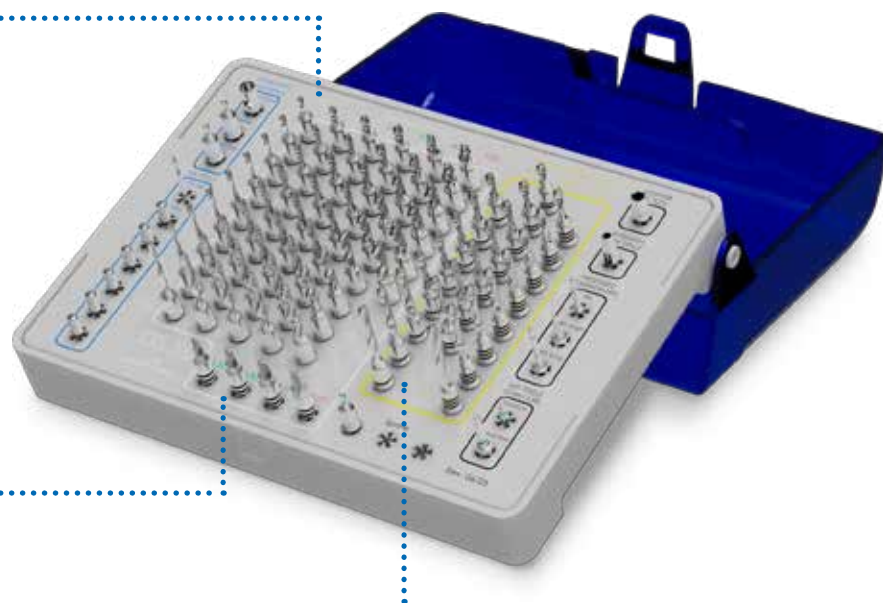

Fresas dedicadas a la inserción profunda de los implantes Prama Power: el kit contiene 3 sets de **fresas DEPTH** utilizables para profundizar la preparación en medida congruente con la altura del cuello de los implantes Prama Power Short neck, Regular neck y Long neck, respectivamente 1.8, 2.8 y 3.8 mm (ver pág. 7).

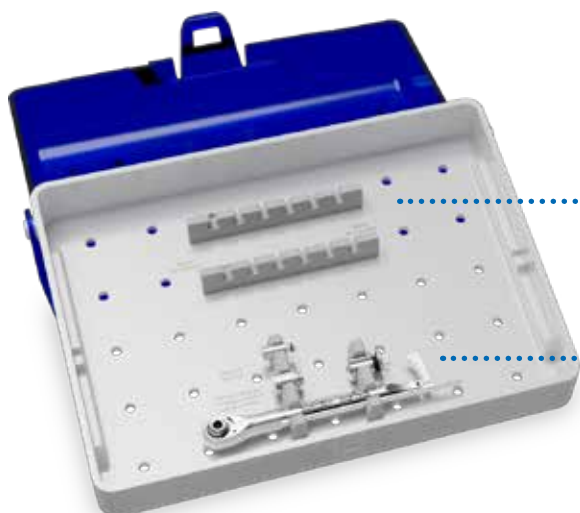

La **bandeja inferior** presenta alojamientos prácticos para organizar los mounters.

La bandeja inferior contiene la llave TWL, que permite la verificación del torque de inserción de los implantes.



Mounter y casquillos 5.0

Dos casquillos compactos, de diámetro 5.0, representan el corazón del sistema junto con dos mounter de altura de 9.00 mm.




El **hexágono del mounter** está alineado con el hexágono del implante. De este modo es posible **gestionar el reposicionamiento** de los pilares según la orientación deseada.

Los **casquillos** presentan en la parte superior, **dos muescas** que pueden usarse como referencia para **alinear 2 aristas opuestas** del hexágono del mounter. Los casquillos son compactos y presentan **dos caras paralelas** alineadas con las dos caras del hexágono, facilitan la alineación del mounter y presentan un reducido volumen mesiodistal.

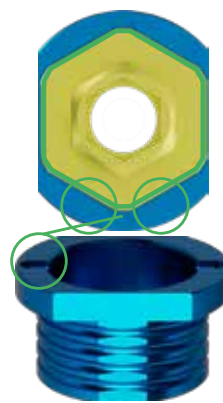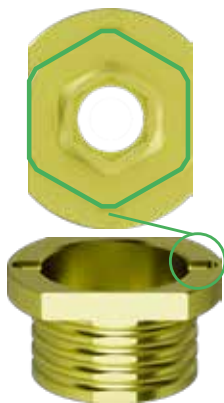

Ideal para protocolos que prevén la preparación de un provisional completamente fresado sin técnica de cemento-atornillado.

Ideal para flujos que prevén la adopción de técnicas más tradicionales, donde no se requiere una tolerancia dimensional excesivamente rígida.

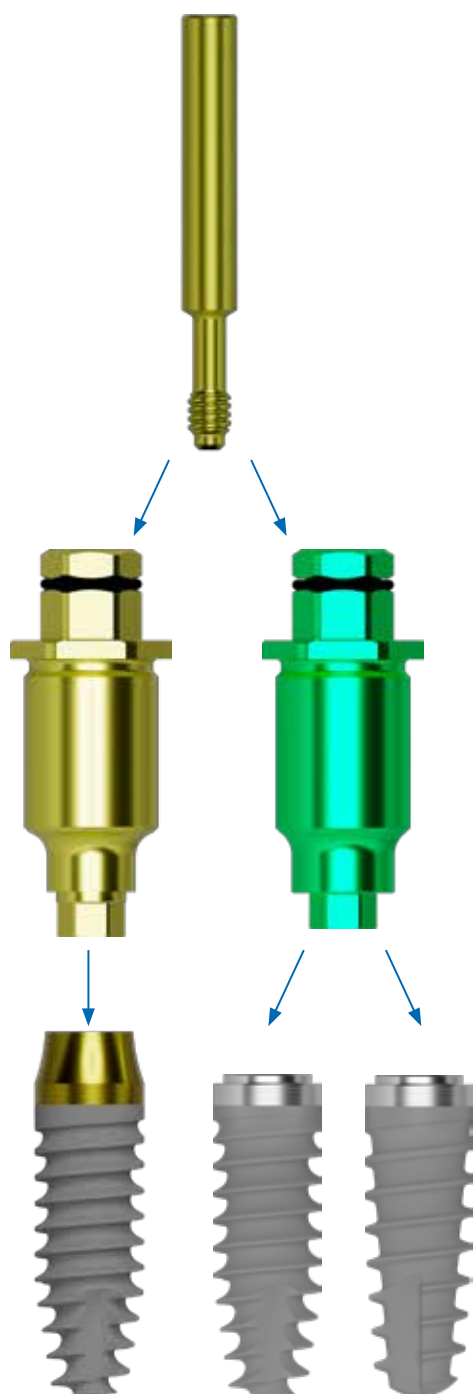


PRAMA

PREMIUM

SHELTA

Vista en sección del mounter y del tornillo de conexión. El mounter presenta una **rosca inversa** que **retiene el tornillo** pasante, previniendo su caída accidental. En caso de dificultad para retirar el mounter, dicha rosca sirve para el enganche del dispositivo de extracción (ver pág. 7). El hexágono del mounter presenta una **tolerancia muy estricta** respecto a la conexión implantaria, **reduciendo al máximo las posibles desviaciones de inserción**.

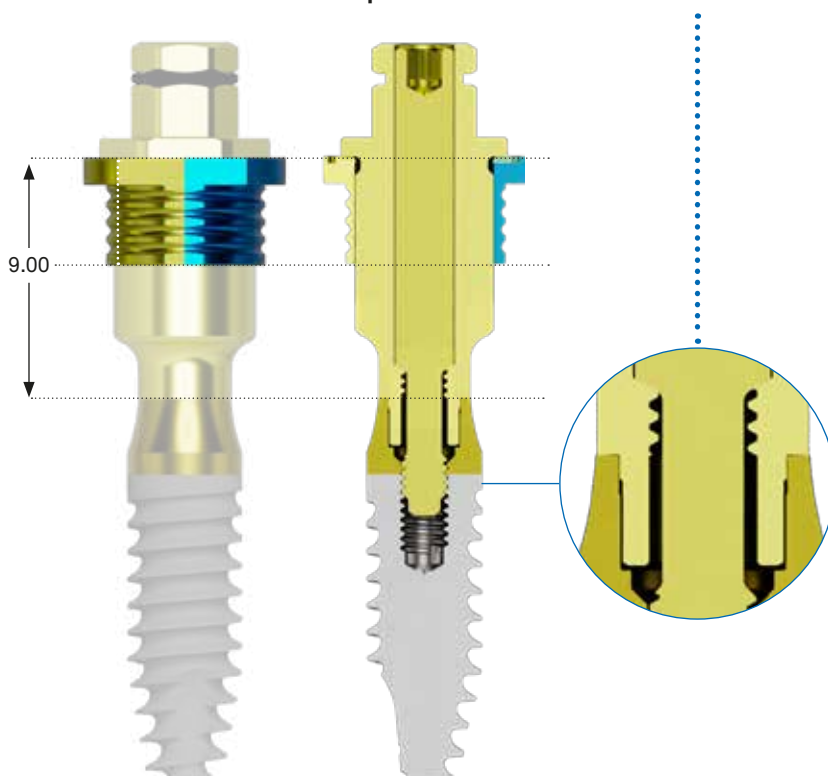

Kit GS 5.0

Código ZGS-L-50-INT

Bisturí circular
GS-MUC-50



Nivelador crestal
GS-LC-50



Fresa piloto
GS-FP200-50



Fresas PREP

Preparan el lecho para una altura correspondiente a la longitud de la parte tratada de los implantes, es decir, para su medida nominal (ver pág. 7).



Pin y fresa para pin
GS-PIN (4 pcs)



GS-FPN-148



Los **mounter** deben adquirirse por separado como accesorios.

GS-MOU-LA330-50

GS-MOU-LA330-50-6 (6 pcs)



GS-MOU-AS380-50

GS-MOU-AS380-50-6 (6 pcs)



También los **casquillos** deben adquirirse individualmente.


GS-B-50

GS-B-50-6 (6 pcs)



GS-B-50W

GS-B-50W (6 uds)

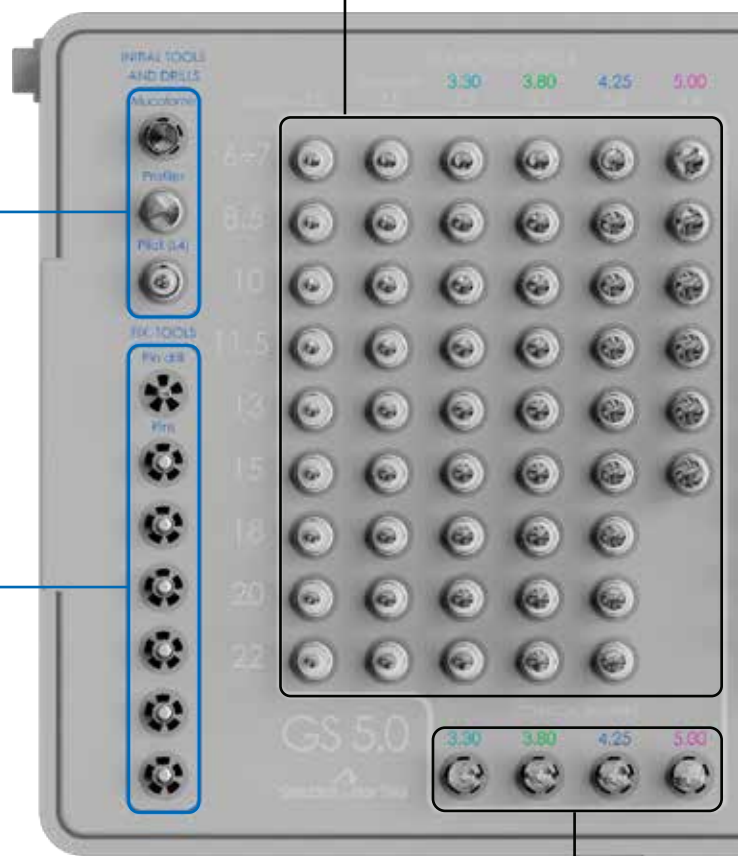

Fresas corticales

Deben usarse para ampliar la preparación de la porción más coronal de los implantes. Se recomiendan en caso de hueso compacto, para no exceder el torque de inserción de los implantes.





Fresas DEPTH

Profundizan la preparación en medida congruente con la altura del cuello de los implantes Prama Power Short neck, Regular neck y Long neck, respectivamente 1.8, 2.8 y 3.8 mm.



El número de marcas es un código visual de identificación del cuello al que la fresa está dedicada:

- 1 marca para implantes Short neck;
- 2 marcas para implantes Standard neck;
- 3 marcas para implantes Long neck.

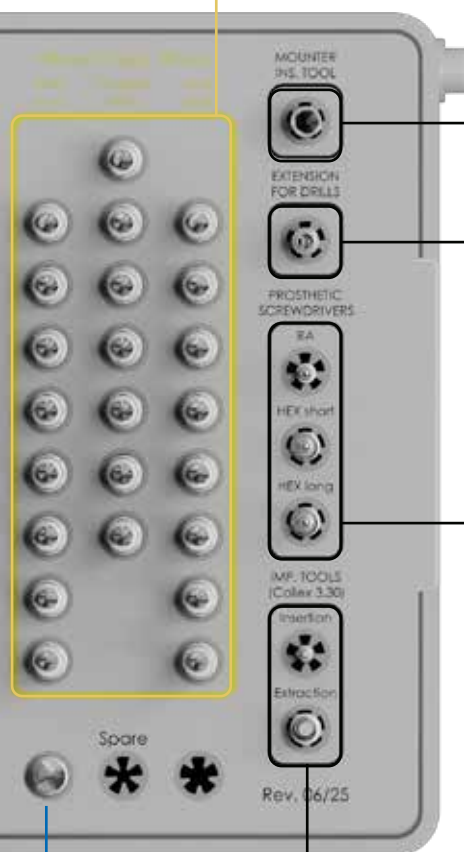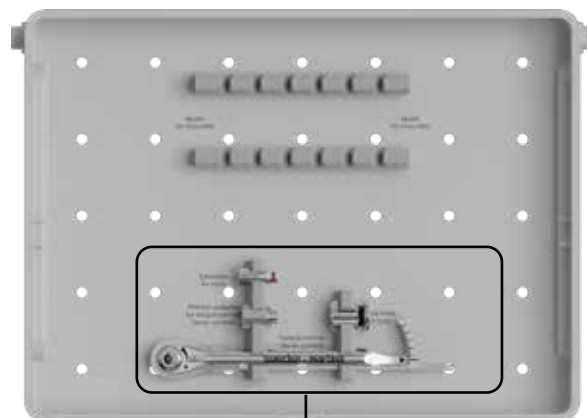

Driver para mounter
B-AVV-CA3



Alargadera para fresas quirúrgicas
PROF-CAL4



Atornilladores protésicos
HSM-20-EX
HSML-20-EX
HSM-20-CA



Llave dinamométrica con palanca de control
TWL



Adaptador para llave dinamométrica
TWL-AVV-EX



Manivela para driver
AVV3-MAN-DG



Alargadera para driver para mounter
BPM-15

Nivelador cresta largo
GS-LC-50-L




Driver para implantes Easy Insert, para intervenir una vez retirado el mounter
EASYC4-EX230-CA


Llave de Allen maciza para la extracción de los implantes
BL-EX230

GS-50-TRAY-INT caja porta instrumentos en Radel.
Todos los instrumentos pueden adquirirse individualmente como repuestos.

Fresas PREP, diámetros iniciales


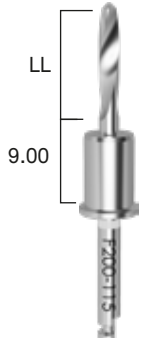
altura nominal del implante*		fresa ø 2.00	fresa ø 2.50	fresa ø 2.90 ●
6.00 mm		GS-F200-070-50	GS-F250-070-50	GS-F290-070-50
8.50 mm		GS-F200-085-50	GS-F250-085-50	GS-F290-085-50
10.00 mm		GS-F200-100-50	GS-F250-100-50	GS-F290-100-50
11.50 mm		GS-F200-115-50	GS-F250-115-50	GS-F290-115-50
13.00 mm		GS-F200-130-50	GS-F250-130-50	GS-F290-130-50
15.00 mm		GS-F200-150-50	GS-F250-150-50	GS-F290-150-50
18.00 mm		GS-F200-180-50	GS-F250-180-50	GS-F290-180-50
20.00 mm		GS-F200-200-50	GS-F250-200-50	GS-F290-200-50
22.00 mm		GS-F200-220-50	GS-F250-220-50	GS-F290-220-50

Fresas PREP, diámetros progresivos

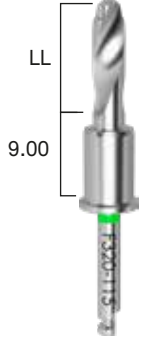altura nominal del implante*		fresa ø 3.20 ●	fresa ø 3.60 ●	fresa ø 4.40 ●
6.00 mm		GS-F320-070-50	GS-F360-070-50	GS-F440-070-50
8.50 mm		GS-F320-085-50	GS-F360-085-50	GS-F440-085-50
10.00 mm		GS-F320-100-50	GS-F360-100-50	GS-F440-100-50
11.50 mm		GS-F320-115-50	GS-F360-115-50	GS-F440-115-50
13.00 mm		GS-F320-130-50	GS-F360-130-50	GS-F440-130-50
15.00 mm		GS-F320-150-50	GS-F360-150-50	GS-F440-150-50
18.00 mm		GS-F320-180-50	GS-F360-180-50	-
20.00 mm		GS-F320-200-50	GS-F360-200-50	-
22.00 mm		GS-F320-220-50	GS-F360-220-50	-

* La longitud de la fresa LL es igual a la longitud del implante

Fresas DEPTH, para profundizar las preparaciones

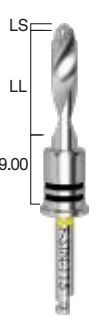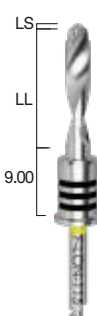altura nominal del implante Prama Power	LS**	LL longitud de trabajo	Para implantes Short neck	LS**	LL longitud de trabajo	Para implantes con Regular neck	LS**	LL longitud de trabajo	Para implantes Long neck
6.00 mm		-	-		8.80 mm	GS-F-STN-060-50		-	-
8.50 mm		10.30 mm	GS-F-SHN-085-50		11.30 mm	GS-F-STN-085-50		12.30 mm	GS-F-LON-085-50
10.00 mm		11.80 mm	GS-F-SHN-100-50		12.80 mm	GS-F-STN-100-50		13.80 mm	GS-F-LON-100-50
11.50 mm		13.30 mm	GS-F-SHN-115-50		14.30 mm	GS-F-STN-115-50		15.30 mm	GS-F-LON-115-50
13.00 mm		14.80 mm	GS-F-SHN-130-50		15.80 mm	GS-F-STN-130-50		16.80 mm	GS-F-LON-130-50
15.00 mm		16.80 mm	GS-F-SHN-150-50		17.80 mm	GS-F-STN-150-50		18.80 mm	GS-F-LON-150-50
18.00 mm		19.80 mm	GS-F-SHN-180-50		20.80 mm	GS-F-STN-180-50		21.80 mm	GS-F-LON-180-50
20.00 mm		21.80 mm	GS-F-SHN-200-50		-	-		23.80 mm	GS-F-LON-200-50
22.00 mm		23.80 mm	GS-F-SHN-220-50		-	-		25.80 mm	GS-F-LON-220-50

Fresas Cortical*

Para implantes $\varnothing$ 3.30 ● Para implantes $\varnothing$ 3.80 ● Para implantes $\varnothing$ 4.25 ● Para implantes $\varnothing$ 5.00 ●



GS-FC-330-50



GS-FC-380-50



GS-FC-425-50



GS-FC-500-50

*Las fresas no están equipadas con un tope de profundidad. Las marcas láser de profundidad están relacionadas con las diferentes alturas de preparación, véanse los ejemplos indicados en las secuencias siguientes.

Complementos para cirugía guiada

casquillo 5.0



GS-B-50



GS-B-50W

mounter



GS-MOU-LA330-50



GS-MOU-AS380-50

tornillo incluido y también disponible como repuesto



GS-VTM0U50-180

extractor para mounter



GS-MOU-EXTR-180


Puntualización sobre las profundidades de preparación

Implantes Prama Power


Ejemplo Short neck

Ejemplo Regular neck


Ejemplo Long neck

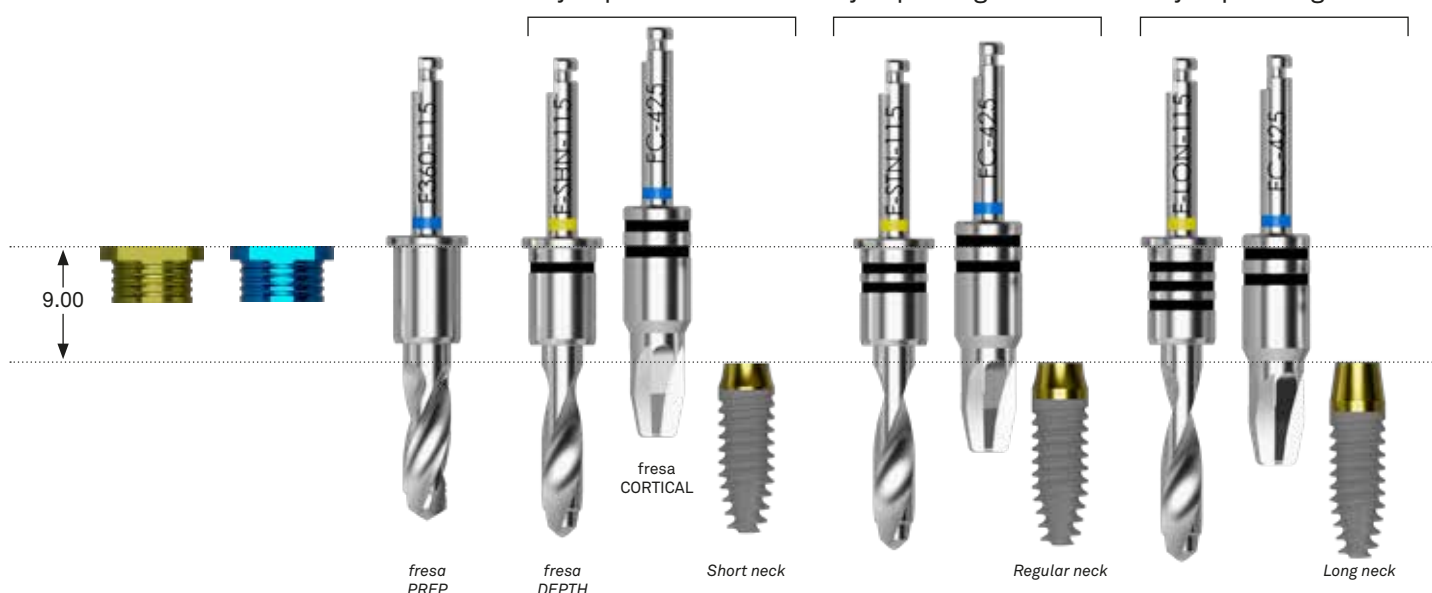

Implantes Premium Shelta Power

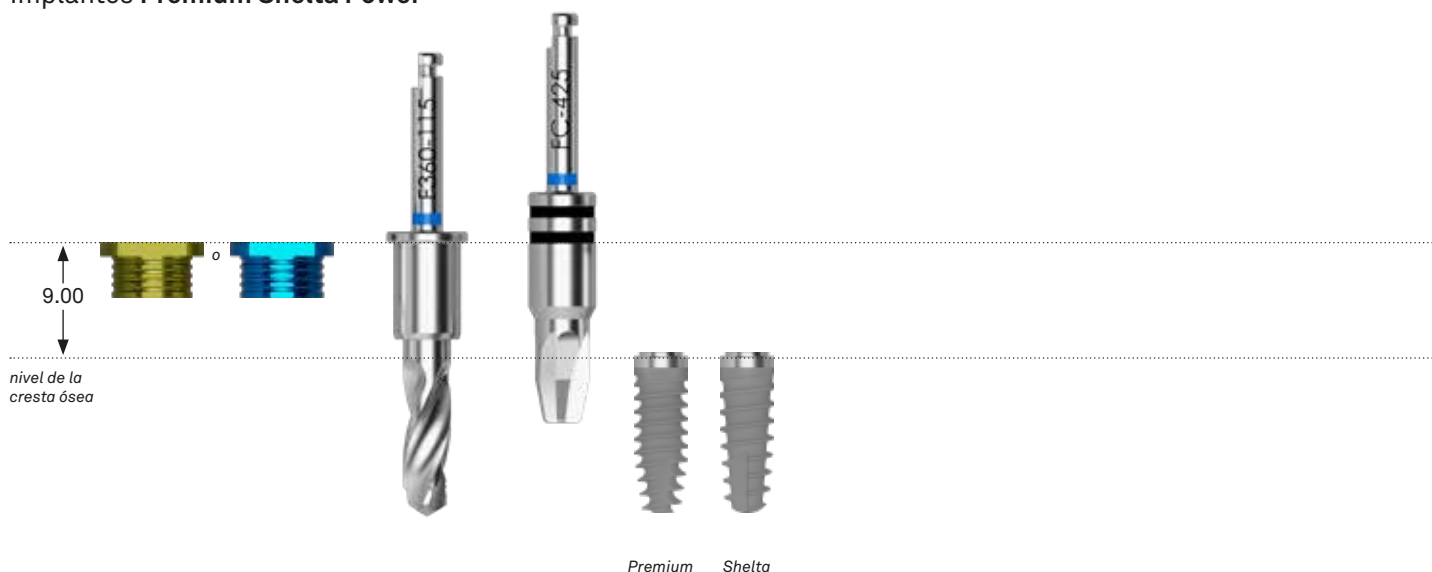

Advertencia importante: Para los implantes Prama Power de $\varnothing$ 3.30 mm no se utilizan las fresas Depth. En general, para los implantes de $\varnothing$ 3.30 mm es necesario utilizar la fresa Prep de 2.50 mm, con una longitud superior a la del implante que se va a colocar.

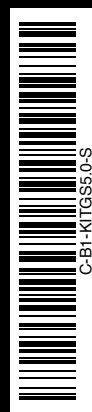

rev. 07-26



Sweden & Martina S.p.A.

Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L.

Avenida de la Industria, 4
Parque Empresarial Natea Business Park
Edificio 0, Portal 2, Oficina Bajo C
28108 Alcobendas, Madrid
Tél: 963525895 - 900535617
info.es@sweden-martina.com

Sweden & Martina Lda

Av. Miguel Bombarda, 35
1050-161 Lisboa, Portugal
Tel. +351 210509559
info.pt@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom

info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com
Sweden Martina Romania srl - România
info.ro@sweden-martina.com
Sweden & Martina France Sarl - France
info.fr@sweden-martina.com

Los implantes, componentes protésicos e instrumental quirúrgico que aparecen en esta publicación son dispositivos médicos fabricados por Sweden & Martina S.p.A.
Los productos presentados cumplen con las normas ISO 9001 e ISO 13485 y cuentan con el marcado CE de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.
La planta de Sweden & Martina fabrica dispositivos médicos de acuerdo con las normas cGMP vigentes en EE. UU. y otros países del mundo.



Algunos productos podrían no estar disponibles para todos los mercados.
Todas las marcas presentes en este catálogo son de propiedad de Sweden & Martina S.p.A., salvo aquellos productos que tengan otra indicación.
Estos productos deberán usarse en estudios médicos y en laboratorios, su venta no está dirigida para el paciente.
Está prohibido vender, duplicar o divulgar los productos contenidos en este catálogo sin el consentimiento escrito de Sweden & Martina S.p.A.
Para mayor información sobre los productos, incluyendo indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y potenciales efectos secundarios, remitir a la página web de Sweden & Martina S.p.A.

Todos los contenidos presentes en este catálogo están actualizados. Contactar con la empresa Sweden & Martina S.p.A., para las actualizaciones siguientes.