

OT EQUATOR® et technique Easy Fix



OT EQUATOR®

Un attachement pour tous les types de prothèses sur implants

OT EQUATOR® est un pilier en titane à profil bas et à diamètre réduit, disponible pour toutes les plateformes implantaires de Sweden & Martina. Les dimensions compactes du système permettent son utilisation même dans les espaces prothétiques les plus réduits.

Sa **polyvalence** permet également de répondre aux différents besoins de conception, offrant une large gamme allant de la réhabilitation prothétique avec overdenture jusqu'à la prothèse fixe sans vis de fixation ni trous correspondants.



Dimensions compactes

stabilité maximale dans les espaces minimaux

Diamètre réduit

encombrement minimal sur les tissus mous

Large gamme

solutions pour toutes les plateformes Sweden & Martina

Profil bas

idéal pour les hauteurs prothétiques réduites

Titane gr. 5 ELI

haute résistance mécanique et biocompatibilité

Polyvalence

compatible pour overdenture et prothèse fixe

Solutions disponibles

La géométrie du pilier OT EQUATOR®, en combinaison avec le boîtier pour capuchons en acier traditionnel, garantit une rétention élevée et durable. Le système permet également de **compenser les disparallélismes implantaires jusqu'à 15°**, tout en préservant l'efficacité et la fonctionnalité des capuchons rétentifs. Pour des disparallélismes implantaires supérieurs à 15° **et jusqu'à 25°**, le système **Smart Box** est la solution idéale, garantissant une compensation efficace des divergences sans compromettre la fonctionnalité du système rétentif.

PILIER UNIQUE



Les piliers peuvent être achetés individuellement avec le code correspondant.

KIT STANDARD



Idéal pour compenser les disparallélismes implantaires jusqu'à 15°, garantissant le maintien de la fonctionnalité des capuchons rétentifs.

Les codes se réfèrent à l'emballage contenant 1 pilier OT EQUATOR®, 4 capuchons assortis, 1 boîtier en acier pour capuchons et 1 digue de protection.

KIT AVEC SMART BOX



La solution idéale pour les disparallélismes implantaires supérieurs à 15° et jusqu'à 25°.

Les codes se réfèrent à l'emballage contenant 1 pilier OT EQUATOR®, 1 boîtier en titane de capuchons Smart Box, 1 digue de protection et 4 capuchons assortis

Connexion Collex One ø 3,30

implant Prama, Premium Power

h mm		unique	set standard	set avec smart box
0.5	 ø 3.50	030PRP3305-SM	130PRP3305-SM	131PRP3305-SM
1.00		030PRP331-SM	130PRP331-SM	131PRP331-SM
2.00		030PRP332-SM	130PRP332-SM	131PRP332-SM
3.00		030PRP333-SM	130PRP333-SM	131PRP333-SM
4.00		030PRP334-SM	130PRP334-SM	131PRP334-SM
5.00		030PRP335-SM	130PRP335-SM	131PRP335-SM

Connexion Collex One ø 3,80

implant Premium Shelta Power

h mm		unique	set standard	set avec smart box
1.00	 ø 3.85	030PRP381-SM	130PRP381-SM	131PRP381-SM
2.00		030PRP382-SM	130PRP382-SM	131PRP382-SM
3.00		030PRP383-SM	130PRP383-SM	131PRP383-SM
4.00		030PRP384-SM	130PRP384-SM	131PRP384-SM
5.00		030PRP385-SM	130PRP385-SM	131PRP385-SM

Connexion Ext Hex 2,40 h 1 mm

implant Outlink²

h mm		unique	set standard	set avec smart box
2.00		030ONK332-SM	130ONK332-SM	131ONK332-SM
3.00		030ONK333-SM	130ONK333-SM	131ONK333-SM
4.00		030ONK334-SM	130ONK334-SM	131ONK334-SM
5.00		030ONK335-SM	130ONK335-SM	131ONK335-SM

Connexion Ext Hex 2,70 h 0.7 mm

implant Outlink², Syra

h mm		unique	set standard	set avec smart box
2.00		030ONK412-SM	130ONK412-SM	131ONK412-SM
3.00		030ONK413-SM	130ONK413-SM	131ONK413-SM
4.00		030ONK414-SM	130ONK414-SM	131ONK414-SM
5.00		030ONK415-SM	130ONK415-SM	131ONK415-SM

Connexion DAT

implant CSR

h mm		unique	set standard	set avec smart box
1.00		030CDT1-SM	130CDT1-SM	131CDT1-SM
2.00		030CDT2-SM	130CDT2-SM	131CDT2-SM
3.00		030CDT3-SM	130CDT3-SM	131CDT3-SM
4.00		030CDT4-SM	130CDT4-SM	131CDT4-SM
5.00		030CDT5-SM	130CDT5-SM	131CDT5-SM

Connexion DAT-N

implant CSR

h mm		unique	set standard	set avec smart box
1.00		030CDTN1-SM	130CDTN1-SM	131CDTN1-SM
2.00		030CDTN2-SM	130CDTN2-SM	131CDTN2-SM
3.00		030CDTN3-SM	130CDTN3-SM	131CDTN3-SM
4.00		030CDTN4-SM	130CDTN4-SM	131CDTN4-SM
5.00		030CDTN5-SM	130CDTN5-SM	131CDTN5-SM

Youse I

h mm		unique	set standard	set avec smart box
1.00		030YI1	130YI1	131YI1
2.00		030YI2	130YI2	131YI2
3.00		030YI3	130YI3	131YI3
4.00		030YI4	130YI4	131YI4
5.00		030YI5	130YI5	131YI5
6.00		030YI6	130YI6	131YI6

Youse V narrow

h mm		unique	set standard	set avec smart box
1.00		030YVN1	130YVN1	131YVN1
2.00		030YVN2	130YVN2	131YVN2
3.00		030YVN3	130YVN3	131YVN3
4.00		030YVN4	130YVN4	131YVN4
5.00		030YVN5	130YVN5	131YVN5
6.00		030YVN6	130YVN6	131YVN6

Youse V regular

h mm		unique	set standard	set avec smart box
1.00		030YVR1	130YVR1	131YVR1
2.00		030YVR2	130YVR2	131YVR2
3.00		030YVR3	130YVR3	131YVR3
4.00		030YVR4	130YVR4	131YVR4
5.00		030YVR5	130YVR5	131YVR5
6.00		030YVR6	130YVR6	131YVR6

Accessoires OT EQUATOR®

	144AE	Analogue de laboratoire
	044CAIN	Transfert d'empreinte normo pces 2
	100PD	Digues de protection pces 10
	140CEG	Capuchons Equator jaunes, pces 4
	140CEN	Capuchons Equator noirs, pces 4
	140CER	Capuchons Equator roses, pces 4
	140CET	Capuchons Equator b/transp., pces 4
	140CEV	Capuchons Equator violets, pces 4
	141CAE	Contenants inox pour capuchons, pces 2
	330SBE	Boîtier en titane Smart Box OT EQUATOR® avec capuchon noir
	192ECE	Assortiment capuchons Equator • 1 contenant inox pour capuchons • 1 capuchon noir de laboratoire • 4 capuchons rétentifs (1 jaune extra-souple, 1 rose souple, 1 blanc transparent standard, 1 violet fort) • 1 digue de protection
	485IC	Outil de pose/extraction de capuchons
	774CQAET	Clé carrée

Accessoires pour prise d'empreinte numérique

	145SAE	Scan abutment avec vis
	144AVC4	Analogue numérique de laboratoire avec vis

*Accessoires utilisables aussi bien pour la réalisation d'overdentures que pour la technique EASY FIX.


Technique Easy Fix pour prothèses fixes sur piliers OT EQUATOR®

Easy Fix est la solution développée par Rhein 83 pour la réalisation de réhabilitations prothétiques Full arch fixes sur implants, sans trous de vis, grâce à l'utilisation des piliers OT EQUATOR®.

La **T-Base** spécifique intègre un anneau innovant circulaire type seeger, conçu pour compenser les disparallélismes implantaires jusqu'à 60°. L'anneau garantit également la rétention de la prothèse. Il est disponible en trois variantes différentes avec des forces rétentives croissantes, sélectionnables en fonction du nombre d'implants utilisés.


Easy Fix représente une solution polyvalente qui combine **contrôle, sécurité et liberté de conception**, permettant au clinicien de réaliser des réhabilitations fixes sur toute plateforme implantaire de Sweden & Martina.

L'utilisation d'un seul composant pendant toutes les phases chirurgicales et prothétiques simplifie le flux de travail, réduisant la gestion des composants et accessoires, les temps opératoires et l'utilisation de matériaux et d'outils, avec des avantages concrets pour la clinique et le laboratoire. Le pilier OT EQUATOR® est également parfaitement intégrable dans les flux numériques modernes et est compatible avec les principaux logiciels CAD-CAM.

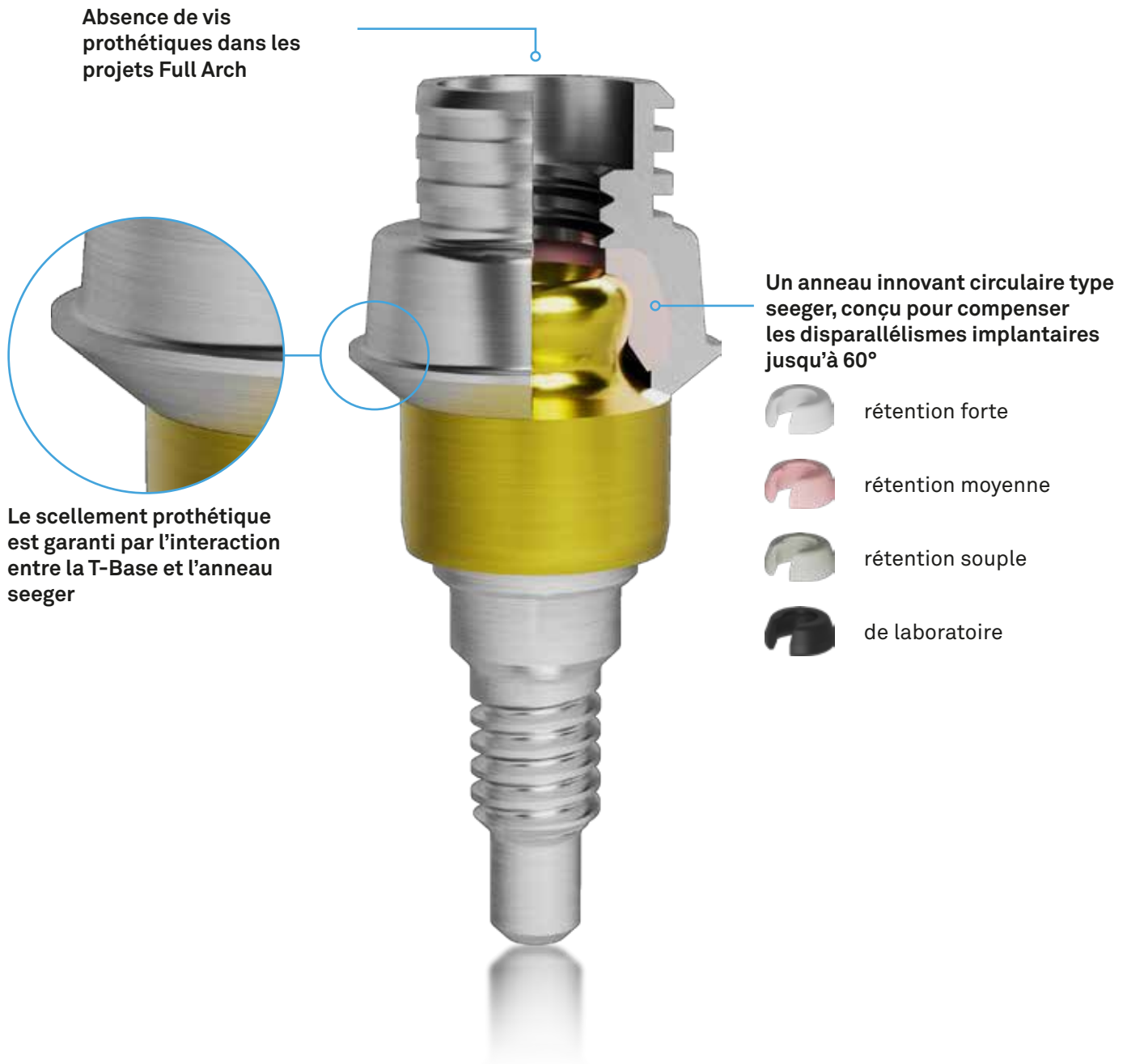

Retrait simple et atraumatique de la prothèse

La technique **Easy Fix** permet de prévoir un **unique trou de déverrouillage**, à travers lequel insérer l'outil approprié. En vissant l'outil de déverrouillage dans la T-Base Easy Fix, la prothèse est progressivement soulevée, permettant son retrait de manière **simple, rapide et atraumatique**.

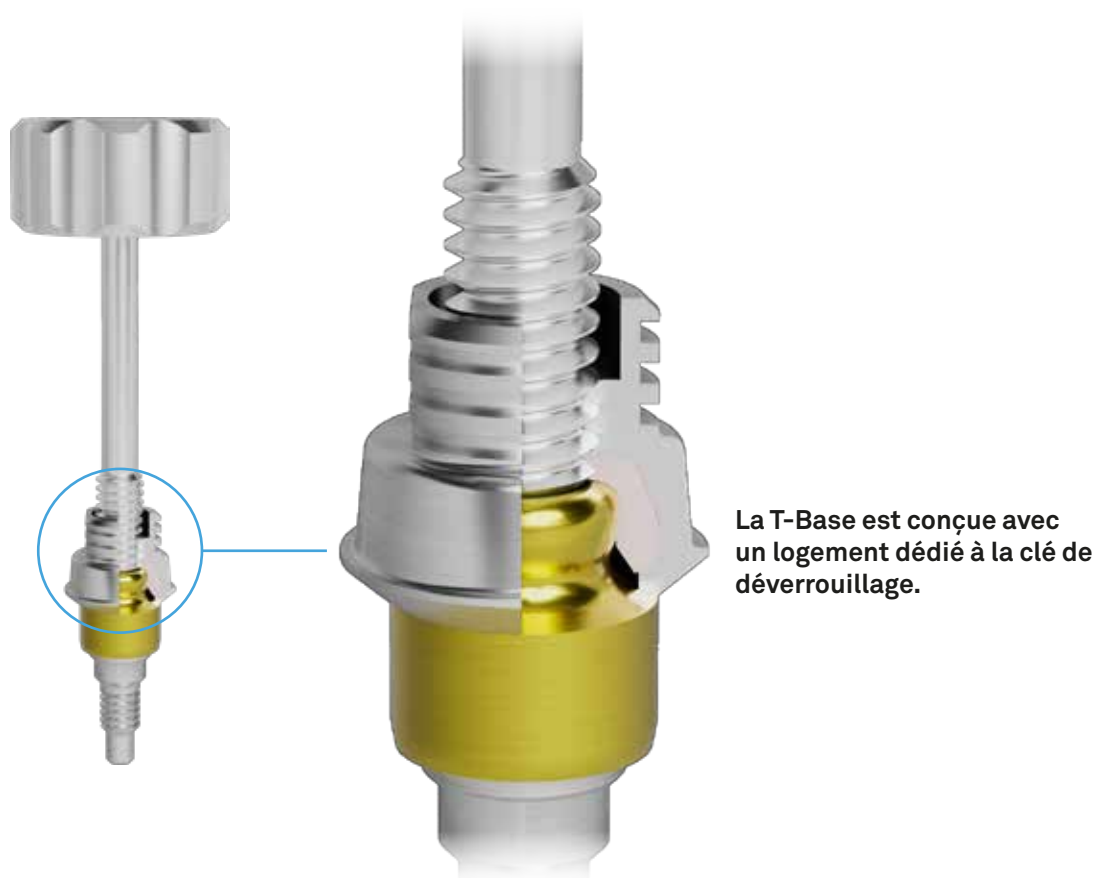

Le trou de déverrouillage peut être positionné à l'endroit le plus approprié du point de vue esthétique et fonctionnel, garantissant la **plus grande liberté de conception** dans la réalisation de la prothèse.

La facilité de retrait de la prothèse simplifie également les procédures d'hygiène et les contrôles périodiques, contribuant à la santé des tissus péri-implantaires.



Composants pour la technique Easy Fix

Les composants nécessaires à la réalisation de la technique Easy Fix sont disponibles en différentes configurations, pour répondre aux différents besoins cliniques et de laboratoire : **T-Base** vendues individuellement, **kit seeger** en différentes configurations et **kit Easy Fix avec T-Base** disponibles en deux versions.

T-Base Easy Fix en titane			Kit seeger Easy Fix en PEEK		
h mm					
4.00		RMEF		KSEF	Kit contenant 4 seeger : noir, rose, ivoire, blanc
6.00		RMAEF		KSL	Kit contenant 4 seeger noirs
9.00		RMLEF		KSM	Kit contenant 4 seeger roses
				KSSO	Kit contenant 4 seeger ivoire
				KSST	Kit contenant 4 seeger blancs

4 T-Bases Easy Fix			
h mm			
4.00		KEF4MEF	Kit contenant : 4 T-Bases ø 3,5 mm, 1 vis de serrage, 4 seeger blancs forts, 4 seeger roses medium, 4 seeger ivoire souples, 4 seeger noirs usage laboratoire
6.00		KEF4MAEF	Kit contenant : 4 T-Bases ø 3,5 mm, 1 vis de serrage, 4 seeger blancs forts, 4 seeger roses medium, 4 seeger ivoire souples, 4 seeger noirs usage laboratoire
9.00		KEF4MLEF	Kit contenant : 4 T-Bases ø 3,5 mm, 1 vis de serrage, 4 seeger blancs forts, 4 seeger roses medium, 4 seeger ivoire souples, 4 seeger noirs usage laboratoire

Kit Easy Fix T-Base			
h mm			
4.00		KMSRF	Kit contenant : 1 T-Base ø 3,5 mm et 4 seeger peek : 1 blanc fort, 1 rose medium, 1 ivoire souple, 1 noir usage laboratoire
6.00		KMASRF	Kit contenant : 1 T-Base ø 3,5 mm et 4 seeger peek : 1 blanc fort, 1 rose medium, 1 ivoire souple, 1 noir usage laboratoire
9.00		KMLSRF	Kit contenant : 1 T-Base ø 3,5 mm et 4 seeger peek : 1 blanc fort, 1 rose medium, 1 ivoire souple, 1 noir usage laboratoire

Accessoires pour technique Easy Fix



144TLE

Transfert long avec vis h 11,50 mm



149TEF

Vis de fermeture



149VEF

Vis de serrage



239VSEF

Vis de transfert/de laboratoire



240GCEF

Gaine calcinable courte h 4,00 mm



240GCAEF

Gaine calcinable h 6,00 mm



240GCLEF

Gaine calcinable longue h 9,00 mm



491EEF

Outil d'insertion / extraction



491SEIM

Tournevis pour T-Base



761EEF

Outil de déverrouillage h 17,90 mm



761ELEF

Outil de déverrouillage long h 23,90 mm



rev. 09-26



Sweden & Martina S.p.A.

Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
info@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom

info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com
Sweden & Martina France Sarl - France
info.fr@sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España

info.es@sweden-martina.com
Sweden & Martina Lda - Portugal
info.pt@sweden-martina.com
Sweden Martina România srl - România
info.ro@sweden-martina.com

Les articles présents dans la publication sont des dispositifs médicaux marqués CE 0425 fabriqués par Rhein 83 S.r.l. Via E.Zago, 10/ABC, 40128 Bologne Italie



Certains produits pourraient ne pas être disponibles sur tous les marchés.

La marque OT EQUATOR® est la propriété de Rhein 83 S.r.l.

Ces produits sont destinés aux cabinets médicaux et aux laboratoires, leur vente n'est pas destinée aux patients.

Il est interdit de revendre, de reproduire ou de diffuser les produits contenus dans la présente publication sans l'autorisation écrite de Sweden & Martina S.p.A.

Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter le site web de Sweden & Martina S.p.A.

Les contenus sont mis à jour au moment de la publication. Contacter l'entreprise Sweden & Martina pour les prochaines mises à jour.